

# Healing Gel

**CZ** Zdravotnický prostředek k léčbě povrchových ran, odřenin, zhmoždění a kožních prasklin.

Dr.Max<sup>+</sup>

**Balení:**

1 tuba, 20 ml

**Indikace:**

Healing Gel je indikován jako doplňková léčba při regeneraci tkání.  
Prostředek působí formou ochranné vrstvy, která vytváří mikroprostředí vhodné k zahájení procesu hojení. Pomáhá při kontrole rizikových faktorů souvisejících s rozvojem léze.  
Ochranná vrstva izoluje lézi a pomáhá chránit postiženou oblast před vnějšími dráždivými faktory a bakteriálním napadením.

**Složení:**

Panthenol, kyselina hyaluronová, jojobový olej, triterpeny pupečníku asijského (*Centella asiatica*), voda, elementární stříbro, chlorhexidin diglukonát, polyvinylpyrrolidon, akryláty / C10–30 alkyakrylátový zesíťovaný polymer, hydroxid sodný, edetát disodný.

**Skladování:**

Skladujte při pokojové teplotě na chladném a suchém místě.

**Datum poslední revize:** 11/2019

**Návod k použití:**

Před použitím a po něm si umyjte ruce.  
Po očištění a vydezinfikování rány naneste a jemně rozetřete vhodné množství gelu na oblast s lézí a její okolí.  
Okraj tuby nepřikládejte přímo na poraněné místo.  
Po použití tubu pečlivě uzavřete.  
Aplikaci opakujte 2krát až 3krát denně, dokud se rána zcela nezahojí.

**Varování:**

Nepoužívejte na infikované, rozsáhlé či hluboké rány.



Labomar Spa  
Via N. Sauro 35 I  
Istrana (TV)  
ITALY

**Distributor:**

Dr. Max Pharma s.r.o.,  
Na Florenci 2116/15, Nové Město,  
110 00 Praha 1, Česká republika

# Healing Gel

**SK** Zdravotnícka pomôcka určená na liečbu povrchových rán, odrenín, modrín a kožných prasklín.

Dr.Max<sup>+</sup>

**Balenie:**

1 tuba, 20 ml

**Indikácie:**

Healing Gel sa používa ako doplnok pri regeneračných procesoch tkanív. Na ich povrchu vytvára ochranný film, ktorý tvorí mikroprostredie vhodné na spustenie procesu regenerácie; pomáha kontrolovať rizikové faktory spojené so vznikom lézií.  
Ochranný film tieto lézie izoluje a pomáha ich chrániť pred dráždivými látkami z vonkajšieho prostredia a baktériami.

**Zloženie:**

Pantenol, kyselina hyaluronová, olej z jojoby, triterpény z pupočníka ázijského, voda, elementárne striebro, chlórhexidín diglukonát, polyvinylpyrolidón, akryláty / C10-30 alkyakrylátový krosopolymér, hydroxid sodný, disodná soľ EDTA.

**Návod na použitie:**

Pred použitím si umyte ruky.  
Po vyčistení a vydezinfikovaní rany naneste a jemne rozotrite primerané množstvo gélu na miesto lézie a jej okolia.  
Tubu neprikladajte priamo na poranené miesto.  
Po použití tubu opatrne uzavrite.  
Opakujte 2- až 3krát denne, kým sa rana úplne nezahojí.

**Upozornenia:**

Nepoužívajte na veľké a hlboké rány.  
Nepoužívajte v prípade alergie alebo



Labomar Spa  
Via N. Sauro 35 I  
Istrana (TV)  
ITALY

**Distribútor:**

Dr. Max Pharma s.r.o.,  
Na Florenci 2116/15, Nové Město,  
110 00 Praha 1, Česká republika



0477