

Oční kapky

Suché oči

CZ Oční sterilní, izotonický, lubrikační, hydratační roztok s kyselinou hyaluronovou 0,1 %.

Indikace:

- lubrikace a hydratace suchých a dehydratovaných očí;
- ideální v případě netraumatických/nepatologických změn slzného filmu;
- oči namáhané vlivem prostředí (vítr, prach, klimatizace, suchý a znečištěný vzduch atd.);
- namáhané oči (dlouhodobé používání počítače, nepříznivé světelné podmínky, noční řízení automobilu atd.);
- indikace v případě dlouhodobého používání kontaktních čoček;
- lze použít také s kontaktními čočkami.

Návod k použití:

Aplikujte jednu nebo dvě kapky do každého oka, jednou nebo vícekrát denně, podle potřeby nebo podle rady odborníka. Pro uživatele kontaktních čoček: aplikujte před použitím nebo po použití čoček 2–3 kapky. Na nasazené čočky aplikujte kapky několikrát denně nebo podle potřeby.

Varování:

- v případě podráždění očí přestaňte přípravek používat a kontaktujte lékaře;
- nepoužívejte, pokud jste alergický/á nebo precitlivělý/á na některou ze složek přípravku;
- nedotýkejte se povrchu oka kapátkem;
- chraňte před zdroji tepla a skladujte na suchém místě při teplotě 5 až 35 °C;
- uchovávejte mimo dosah dětí;
- nepožívejte;
- nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti;
- spotřebujte do 90 dnů od prvního použití;
- sterilní až do prvního použití;
- lahvičku po každém použití pevně uzavřete;
- nepoužívejte přípravek, pokud obal jeví známky poškození.

Složení:

Hyaluronát sodný 0,1 %, edetát disodný a PHMB, izotonický pufrovaný roztok s pH 7,2.

Neobsahuje:

Chlorhexidin, thimerosal, benzalkoniumchlorid, fenoxethanol a jakékoli složky živočišného původu.

10 ml

Distributor: Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika

Očné kvapky

Suché oči

SK Očný sterilný, izotonický, lubrikačný a hydratačný roztok s obsahom 0,1 % kyseliny hyaluronovej.

Indikácie:

- lubrikácia a hydratácia suchých a dehydratovaných očí;
- ideálne v prípade netraumatických/nepatologických zmien slzného filmu;
- oči namáhané vplyvom prostredia (vietor, prach, klimatizácia, suchý a znečistený vzduch atď.);
- zraková únava (dlhodobé používanie počítača, nepriaznivé svetelné podmienky, nočné šoférovanie atď.);
- v prípade dlhodobého použitia kontaktných šošoviek;
- tiež vhodné na použitie pri kontaktných šošovkách.

Návod na použitie:

Kvapnite jednu až dve kvapky do každého oka, jeden alebo viackrát denne, podľa potreby alebo odporúčania špecialistu. Pre používateľov kontaktných šošoviek: aplikujte 2-3 kvapky pred alebo po použití šošoviek. Na nasadené šošovky aplikujte kvapky podľa potreby.

Upozornenia:

- v prípade podráždenia očí prestaňte produkt používať a kontaktujte svojho lekára;
- nepoužívajte v prípade alergie alebo precitlivenosti na akúkoľvek zložku produktu;
- nedotýkajte sa kvapkadlom povrchu oka;
- uskladňujte mimo zdroja tepla, skladujte na suchom mieste pri teplote 5 - 35 °C;
- uskladňujte mimo dosahu detí;
- neprehŕtajte;
- nepoužívajte po dátume spotreby;
- spotrebujte do 90 dní od prvého použitia;
- sterilné do prvého použitia;
- po každom použití fľašu pevne uzavrite;
- nepoužívajte výrobok, ak sa zdá, že obal je poškodený.

Zloženie:

Hyaluronát sodný 0,1 %, edetát disodný a PHMB, izotonický tlmivý roztok s pH 7,2.

Neobsahuje:

Chlórhexidín, tiomersal, benzalkóniumchlorid, fenoxetanol a akékoľvek zložky živočišného pôvodu.

10 ml

Distribútor: Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika