



SK Náplasti na kurie oká s kyselinou salicylovou

Dr.Max⁺

Zdravotnícka pomôcka

Náplasti na kurie oká s kyselinou salicylovou sú prostriedkom určeným na ochranu pred bolestivým tlakom spôsobeným kožnými zmenami, chránia proti otlakom a pomáhajú kurie oká účinne a bezpečne odstraňovať. Znižujú tlak na boľavé miesto a prinášajú okamžitú úľavu. Dlhodobé používanie náplasti bráni prístupu vzduchu, tým sa pokožka alebo zrohovatený zhľuk buniek zmäkčuje a v keratíne sa zhromažďuje voda. Vďaka tomuto procesu sa pokožka alebo zrohovatený zhľuk buniek zmäkčuje a jednoducho odstraňuje. Odstránenie kurieho oka ďalej uľahčuje hmota vyplňajúca krúžok obsahujúci kyselinu salicylovú a kyselinu mliečnu, saponíny, terpény a kopaivský balzam.

ZLOŽENIE

Účinná látka: Kyselina salicylová 35 %; kyselina mliečna 1,2 %, lanolín, žltý vosk, smreková živica, kopolymér etylénu a vinylacetátu, podzemok kosatca, mednatý komplex chlorofylu, terpentín, kopaivský balzam, lepidlo, vlákna, papier.

NÁVOD NA POUŽITIE

Používať v súlade s odporúčaním. Odstrániť ochrannú fóliu a náplasť prilepiť na čisté a suché chodidlo tak, aby ochranný krúžok lemoval kurie oko. Vďaka tomu náplasť chráni miesto s chorobnými zmenami proti otlakom a odreninám a prináša okamžitú úľavu. Náplasť treba starostlivo prilepiť tak, aby mohla plniť funkciu okluzívneho obväzu. Hmota vyplňajúca krúžok, ktorá obsahuje kyselinu salicylovú a kyselinu mliečnu a ďalej pomocné látky, uľahčuje odstraňovanie kurieho oka. Náplasti používajte do okamihu, než bude kurie oko

odstránené, maximálne však 10 – 14 dní. Každú náplasť prikladajte cca na 24 hodín. Po ukončení liečby možno odstrániť strednú časť kurieho oka kúpeľom chodidiel v teplej vode so soľou a mydlom. Ak sa počas liečby prejaví precitlivosť a sčervenanie pokožky, počkajte s použitím ďalších náplasti.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Náplasť na kurie oká je určená na vonkajšie, jednorazové, samostatné použitie, a to iba v mieste kožných zmien (kurie oko). Náplasť na kurie oká nemožno používať: v prípade známej precitlivlosti na kyselinu salicylovú, salicylany a na akúkoľvek inú zložku náplasti, u dočiat, detí, na chorú pokožku (napr. zápalové stavy, rany, vriedky), u pacientov s obličkovými poruchami (obličková nedostatočnosť), u pacientov s cukrovkou a ďalej u pacientov so zlou cirkuláciou krvi a zápalovými stavmi ciev. Kyselina salicylová takisto môže zvyšovať priestupnosť pokožky pre iné lokálne aplikované lieky. Náplasť na kurie oká s kyselinou salicylovou nesmie byť v kontakte so sliznicami. Zvlášť treba zabrániť kontaktu s očami, náplasť takisto nemožno používať na tvár. V prípade tehotenstva a dojčenia treba použitie náplasti obmedziť na oblasti menšie ako 5 cm². V prípade pochybností kontaktujte lekára.

SKLADOVANIE

Skladovať v suchu, pri teplote od 5 °C do 25 °C, chrániť pred deťmi.

OBSAH

12 kusov.

Verzia a dátum vydania návodu: Ver. 03 03/2021



Langsteiner Sp. z o.o.,
Mników 405,
PL 32-084 Morawica,
Poľsko

Distribútor:

Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika

