

Scar Gel

CZ Gel k ošetření jizev a strií
Návod k použití

Scar Gel je zdravotnický prostředek určený k prevenci a léčbě hypertrofických a keloidních jizev, které se vyskytují na kůži po operaci, poranění nebo v důsledku popálenin, tetování, piercingu, akné nebo abscesů. Je také indikován k prevenci a léčbě strií.

Poznámka:

Před použitím **Scar Gelu** si pozorně přečtěte tento návod k použití, a to i v případě, že jste tento zdravotnický prostředek již dříve používali. Informace se od posledního použití tohoto zdravotnického prostředku mohly změnit podle nových výzkumů a zjištění. Tento návod si uschovejte – je možné, že do něj budete muset znovu nahlédnout.

Přínosy:

- Gel lze aplikovat na jizvu jakéhokoli typu, velikosti nebo umístění na těle, včetně obličeje, kloubů nebo ochlupených částí těla.
- Je bezpečný při použití u dětí, během těhotenství a kojení a u osob s citlivou pokožkou.

Scar Gel je třeba aplikovat krátce po uzavření jizvy (obvykle 2–3 týdny po poranění nebo chirurgickém zákroku). Doba léčby se pohybuje od 8 týdnů (nově vzniklé jizvy) do 3–6 měsíců (staré jizvy). U strií během těhotenství se doporučuje začít používat **Scar Gel** od 2. trimestru a pokračovat další 2–3 měsíce po porodu. U ostatních typů strií se doporučuje používat **Scar Gel** po celou dobu, kdy je kůže vystavena zátěži, a po tomto období pokračovat po dobu dalších 2–3 měsíců.

Postup:

Na jizvu naneste tenkou vrstvu **Scar Gelu**, jemně vetřete a nechte zaschnout. Takto vytvořený ochranný a pružný film dovoluje kůži dýchat a zároveň zůstát hydratovaná. Umožňuje normální syntézu kolagenu podporující správný fyziologický proces vzniku jizvy. Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být silikonový film udržován nepřetržitě v kontaktu s kůží (24 hodin denně). Pokud jste nanесли příliš mnoho gelu, bude trvat déle, než zaschne, a může dojít ke znečištění oblečení. Opatrně odstraňte přebytek a nechte dále zasychat. Pokud oblast aplikace omýjete, opakujte aplikaci **Scar Gelu**, abyste obnovili silikonovou ochrannou vrstvu.

Účinek začíná být viditelný za 8 týdnů. Tato doba závisí především na individuální reakci každého pacienta.

-  Pouze k zevnímu použití. Vyvarujte se kontaktu s očima a sliznicemi. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
- Pokud jste citlivý/á na jakékoli složky přípravku nebo pokud se u vás objevil závažný zánět nebo svědění tkáně, přestaňte přípravek okamžitě používat a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte na otevřené rány a popáleniny třetího stupně. Nepoužívejte v případě precitlivělosti na jakoukoli složku přípravku. Přípravek nepoužívejte, pokud je obal poškozený, tuba je otevřená nebo jinak poškozená.
- Prázdnou nádobu nebo nepoužitý přípravek zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy a směrnicemi místního orgánu odpovědného za nakládání s odpady.
- Tento přípravek nikdy nevyhazujte do odpadních vod nebo komunálního odpadu. Toto preventivní opatření je určeno k ochraně životního prostředí.

 Skladujte při teplotě do 25 °C v původním balení.

Složení: Polydimethylsiloxan, polydimethylsiloxan krosopolymer, trimethylsiloxysilikát.

Balení: Kartonová krabička s hliníkovou tubou obsahující 15 g gelu a návod k použití.

Datum poslední revize tohoto návodu k použití: 11/2019.

Scar Gel představuje zdravotnický prostředek třídy I, nesterilní a bez funkce měření podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

-  **Doba použitelnosti:**
-  Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

	Upozornění		Výrobce
	Přečtěte si návod k použití		Datum použitelnosti
	Skladujte při teplotě do		Číslo šarže (série)
	Nesterilní		

Scar Gel

SK Gél na ošetrenie jaziev a strií
Návod na použitie

Scar Gel je zdravotnícka pomôcka určená na prevenciu a ošetrovanie hypertrofických a keloidných jaziev prítomných na pokožke po operácii a úraze alebo ako dôsledok popálenín, tetovania, piercingov, akné alebo abscesov. Taktiež je určená na prevenciu a ošetrovanie strií.

Poznámka:

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie pred použitím **Scar Gelu**, a to aj v prípade, že ste už túto zdravotnícku pomôcku predtým používali. Uvedené informácie sa mohli zmeniť v súlade s novým výskumom a zisteniami od vášho posledného používania tejto zdravotníckej pomôcky. Tento návod na použitie si odložte, je možné, že ho budete v budúcnosti potrebovať.

Výhody:

- Gél je možné aplikovať na jazvy akéhokoľvek typu, veľkosti alebo ich umiestnenia na tele vrátane tváre, kĺbov alebo ochlpených častí tela.
- Prípravok je bezpečný pri používaní deťmi, počas tehotenstva, počas dojčenia a u ľudí s citlivou pleťou.

Scar Gel by mal byť aplikovaný čoskoro po tom, ako sa jazva uzavrie (obvykle 2 – 3 týždne po úraze alebo chirurgickom zákroku). Čas ošetrovania kolíše medzi 8 týždňami (nové jazvy) až 3 – 6 mesiacmi (staré jazvy). Pre strie vzniknuté počas tehotenstva sa odporúča začať s aplikáciou **Scar Gel** od druhého trimestra a pokračovať až do 2 – 3 mesiacov po narodení dieťaťa. Pre iné typy strií sa odporúča používať **Scar Gel** v čase, keď pokožka podstupuje napätie, a pokračovať až do 2 – 3 mesiacov po skončení tohto obdobia.

Postup:

Aplikujte tenkú vrstvu **Scar Gelu** na jazvu, jemne vmasírujte a nechajte ho uschnúť. Vytvorí sa ochranný, pružný, vodoodolný silikónový film priepustný voči plynom. To pokožke umožní normálnu syntézu kolagénu, ktorá podporuje normálny proces zjazvenia. Pre najlepšie výsledky by mal byť silikónový film udržiavaný nepretržite v kontakte s pokožkou (24 hodín denne). Pokiaľ ste aplikovali príliš veľa gélu, bude trvať dlhšie, než uschne, a môžete riskovať znečistenie vášho oblečenia. Jemne odstraňte nadmerný gél a nechajte zvyšný gél na pokožke uschnúť. Pokiaľ natretú oblasť umyjete vodou, opakujte aplikáciu **Scar Gelu**, aby sa obnovila silikónová ochranná vrstva.

Efekty aplikovania začnú byť viditeľné po 8 týždňoch; toto obdobie závisí prevažne od individuálnej odozvy každého pacienta.

-  Iba na vonkajšie použitie. Vyhnite sa kontaktu s očami a sliznicami. Udržiavajte mimo dosahu a dohľadu detí.
- Ak ste citlivý/citlivá na akúkoľvek zložku výrobku alebo ak ste spozorovali zápal alebo svrbenie pokožky, ihneď prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte na otvorené rany a popáleniny tretieho stupňa. Nepoužívajte v prípade precitlivlosti na akúkoľvek zložku prípravku.
- Nepoužívajte prípravok, ak je poškodený obal, tuba je otvorená alebo akokoľvek inak poškodená.
- Prázdny obal alebo nepoužitý prípravok zlikvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi a smernicami miestneho orgánu zodpovedného za odpadové hospodárstvo.
- Nikdy nevyhadzujte tento výrobok do odpadovej vody ani do bežného komunálneho odpadu. Toto opatrenie je určené pre ochranu životného prostredia.

 Skladujte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.

Zloženie: Polydimetyl siloxán, polydimetyl siloxán krosopolymér, trimetyl siloxysilikát.

Obal: Kartónová krabička s hliníkovou tubou obsahujúcou 15 g gélu a návod na použitie.

Dátum poslednej revízie tohto návodu na použitie: 11/2019.

Scar Gel je zdravotnícka pomôcka triedy I, nesterilná a bez funkcie merania, v súlade so Smernicou o zdravotníckych pomôckach 93/42/EEC.

-  **Dátum expirácie:**
-  Nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na obale.

	Upozornenie		Výrobca
	Prečítajte si návod na použitie		Dátum expirácie
	Skladujte pri teplote do		Číslo šarže
	Nesterilné		