

CZ Hydrokoloidní krytí

Dr.Max⁺

Návod na použití zdravotnického prostředku

Popis

Hydrokoloidní krytí je vyrobeno z PU materiálu a hydrokoloidní hmoty, pomáhá udržovat vlhké prostředí pro podporu hojení.

Kdy používat

Hydrokoloidní krytí lze použít pro lehké až středně silně exsudující rány, jako jsou:

- Chirurgické rány
- Traumatické rány
- Dekubity
- Povrchové a částečné popáleniny
- Diabetické vředy

Návod k použití

1. Pečlivě očistěte, osušte a v případě potřeby vydezinfikujte ošetřované místo.
2. Odstraňte jeden ze dvou ochranných štítků.
3. Přiložte lepicí stranu na ránu a odstraňte druhý ochranný štítek.
4. Krytí stiskněte a pečlivě vyhladte. Nenatahujte.



Krytí poprvé vyměňte 24 hodin po první aplikaci a pak vždy po 48 hodinách, nebo pokud se krytí samo odlepi nebo absorbuje větší množství sekretu a začne být víc a víc bílé.

Průměrná doba léčby je 6 až 8 dní.

Funkce

Udržuje ránu ve vlhkém prostředí, podporuje hojení.

Působí jako vodotěsná bezpečná bariéra proti bakteriím.

Pružná podkladová vrstva snižuje tření pokožky s oblečením a lůžkovinami.

Snadno se odlepjuje, nepřilne k ráně, účinně snižuje potenciální poškození a bolest.

Polopropusivní materiál umožňuje znižit sledování procesu hojení bez nutnosti odstraňování krytí.

Upozornění

Nepoužívejte u pacientů se známou precitlivlostí na krytí nebo jeho složky.

V případě známké infekce se poraďte s lékařem o adekvátní léčbě infekce.

Nevhodné pro infikované rány, velké, hluboké rány s mrtvou tkání.

Ostatní informace

Nepoužívejte opakovaně. Nepoužívejte, pokud je vnitřní obal poškozený nebo otevřený.

Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti.

Skladování

Výrobek by měl být skladován v dobře větrané čisté místnosti s relativní vlhkostí nižší než 80 %, teplotou 5 °C až 35 °C a bez korozivních plynů.

Symboly uvedené na obalu

	Výrobce		Nepoužívejte opakovaně
	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství		Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
	Použitelné do		Teplotní rozsah
	Číslo šarže		Neobsahuje latex
	Přečtěte si návod k použití		Udržujte v suchu
	Sterilizováno radiací		Chraňte před sluncem

SK Hydrokoloidné krytie

Dr.Max⁺

Návod na použitie zdravotníckej pomôcky

Popis

Hydrokoloidné krytie je vyrobené z PU materiálu a hydrokoloidnej hmoty, pomáha udržiavať vlhké prostredie na podporu hojenia.

Na čo sa používa

Hydrokoloidné krytie je možné použiť na ľahko až stredne silne exsudujúce rany, ako sú:

- Chirurgické rany
- Traumatické rany
- Dekubity
- Povrchové a čiastočné popáleniny
- Diabetické vředy

Návod na použitie

1. Starostlivo očistite, osušte a v prípade potreby vydezinfikujte ošetrované miesto.
2. Odstráňte jeden z dvoch ochranných štítkov.
3. Priložte lepiacu stranu na ranu a odstráňte druhý ochranný štítek.
4. Krytie stlačte a starostlivo vyhladte. Nenahajte.



Krytie vymeňte prýkrát za nové po 24 hodinách a potom vždy po 48 hodinách, alebo ak sa krytie samo odlepi alebo ak absorbuje väčšie množstvo sekretu a začne byť viac a viac bežšie.

Priemerná doba liečby je 6 až 8 dní.

Funkcie

Udržiava ranu vo vlhkom prostredí, podporuje jej hojenie.

Je vodotesná a pôsobí ako bezpečná bariéra proti baktériám.

Pružná podkladová vrstva znižuje trenie pokožky s oblečením a lôžkovinami.

Ľahko sa odlepjuje, neprilne k rane, čím účinne znižuje možné poškodenie a bolesť.

Polopriepustný materiál umožňuje ľahšie sledovanie procesu hojenia bez nutnosti odstraňovania krytia.

Upozornenie

Nepoužíajte u pacientov so známou precitlivosťou na krytie alebo jeho zložky.

V prípade známké infekcie sa poraďte s lekárom o adekvátnej liečbe infekcie.

Nevhodné na infikované rány, veľké, hlboké rány s mŕtvym tkanivom.

Ostatné informácie

Nepoužíajte opakovanne. Nepoužíajte, ak je vnútorný obal poškodený alebo otvorený.

Nepoužíajte výrobok po dátume expirácie.

Skladovanie

Výrobok by mal byť skladovaný v dobre vetranej čistej miestnosti s relatívnou vlhkosťou nižšou ako 80 %, teplotou 5 °C až 35 °C a bez korozívnych plynov.

Symboly uvedené na obale

	Výrobca		Nepoužíajte opakovanne
	Oprávnený zástupca pre európske spoločenstvá		Nepoužíajte, ak je obal poškodený
	Použitelné do		Teplotný rozsah
	Číslo šarže		Neobsahuje latex
	Přečítajte si návod na použitie		Udržujte v suchu
	Sterilizované radiáciou		Chráňte pred slnkom

Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., Ltd.,
No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area,
322002, Yiwu City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Distributor/Distribútor:
Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

CE 0123