

Oční voda

CZ Zdravotnický prostředek

Indikace:

Dr. Max Oční voda je sterilní oční roztok určený pro hygienu a hydrataci očí, očních víček a pokožky kolem očí s kyselinou hyaluronovou, extraktem ze světlíku lékařského (*Euphrasia officinalis*) a gelem z aloe vera. Díky svému neutrálnímu pH a specifickým složkám pomáhá navodit příjemný pocit svěžesti a úlevy v případě zarudlých a unavených očí.

- Dr. Max Oční vodu lze použít při nepříjemných pocitech v oku, způsobených zejména vnějšími vlivy, jako např.:
- podráždění očí prachem nebo pylem,
 - delší kontakt s mořskou nebo bazénovou vodou,
 - delší vystavení přírodním vlivům (vítr, slunce),
 - delší pobyt v klimatizovaných prostorách nebo v zakouřeném prostředí,
 - lokální farmakologická léčba (zbytky krémů a mastí),
 - dlouhodobé používání kontaktních čoček,
 - delší sledování obrazovky,
 - pocit cizího tělesa v oku,
 - pocit suchosti,
 - únava, apod.

Návod k použití:

Součástí balení je i vyplachovací vanička. Dr. Max Oční vodu lze použít s vyplachovací vaničkou nebo bez ní. Likvidujte v souladu s místními zákony.

Použití s vyplachovací vaničkou:

1. Před aplikací vyplachovací vaničku dobře vypláchněte Dr. Max Oční vodou.
2. Naplňte vaničku Dr. Max Oční vodou.
3. Vyplachovací vaničku přiložte k oku.
4. Lehce nakloňte hlavu, nechte oko otevřené a několik sekund oko oplachujte v roztoku.



2



3



4

5. V případě potřeby postup několikrát opakujte a po každém opláchnutí oka roztok vyměňte.
6. Po každém použití vaničku vypláchněte pod tekoucí vodou.

Použití bez vyplachovací vaničky:

1. Oko propláchněte dostatečným množstvím roztoku přímo z lahvičky, ale dbejte na to, aby aplikační část lahvičky nikdy nepřišla do kontaktu s povrchem oka.
2. Počkejte několik sekund a postup několikrát opakujte.
3. Pro vyšší účinek můžete postup opakovat i několikrát denně.

Upozornění:

- V případě podráždění nepokračujte v používání Dr. Max Oční vody a kontaktujte očního lékaře.
- Nepoužívejte v případě alergie nebo precitlivlosti na některou ze složek přípravku.
- Nepolykejte.
- Nedovoľte, aby se lahvička dotkla oka nebo očního víčka.
- Nemíchejte roztok s jinými tekutinami.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nosíte kontaktní čočky.
- Spotřebujte do 90 dnů od otevření.
- Po každém použití lahvičku pečlivě uzavírejte.
- Před každým použitím propláchněte vyplachovací vaničku roztokem Dr. Max Oční voda.
- Skladujte v suchu při teplotě od 5 °C do 35 °C.
- Ukládejte mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
- Přípravek je sterilní do okamžiku prvního otevření lahvičky.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce.

Složení:

Kyselina hyaluronová 0,02 %, Aloe vera gel, extrakt ze světlíku lékařského (*Euphrasia officinalis*), edetát disodný, PHMB, izotonický pufovaný roztok s pH 7,2.
Neobsahuje: benzalkoniumchlorid, chlorhexidin, fenoxyletanol, thimerosal.

Objem: 100 ml

Poslední revize textu: 20/02/2024

Očná voda

SK Zdravotnícka pomôcka

Indikácie:

Dr. Max Očná voda je sterilný očný roztok určený na hygienu a hydrataciu očí, očných viečok a pokožky okolo očí s kyselinou hyalurónovou, extraktu z očianky lekárskej (*Euphrasia officinalis*) a gélu z aloe vera. Vďaka svojmu neutrálnemu pH a špecifickým zložkám pomáha navodiť príjemný pocit sviežosti a úľavy v prípade začervenaných a unavených očí.

- Dr. Max Očnú vodu je možné použiť pri nepříjemných pocitech v oku spôsobených najmä vonkajšími vplyvmi, ako napr.:
- podráždenie očí prachom alebo peľom,
 - dlhší kontakt s morskou alebo bazénovou vodou,
 - dlhšie vystavenie prírodným vplyvom (vietor, slnko),
 - dlhší pobyt v klimatizovaných priestoroch alebo v zafajčenom prostredí,
 - lokálna farmakologická liečba (zvyšky krémov a mastí),
 - dlhodobé používanie kontaktných šošoviek,
 - dlhšie sledovanie obrazovky,
 - pocit cudzieho telesa v oku,
 - pocit suchosti,
 - únava a pod.

Návod na použitie:

Súčasťou balenia je aj vyplachovacia vanička. Dr. Max Očnú vodu je možné použiť s vyplachovacou vaničkou alebo bez nej. Likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi.

Použitie s vyplachovacou vaničkou:

1. Pred aplikáciou vyplachovaciu vaničku dobre vypláchnite Dr. Max Očnou vodou.
2. Naplňte vaničku Dr. Max Očnou vodou.
3. Vyplachovaciu vaničku priložte k oku.
4. Mierne nakloňte hlavu, nechajte oko otvorené a niekoľko sekúnd vyplachujte oko v roztoku.



2



3



4

5. V prípade potreby postup niekoľkokrát opakujte a po každom opláchnutí oka roztok vymeňte.
6. Po každom použití vaničku vypláchnite tečúcou vodou.

Použitie bez vyplachovacej vaničky:

1. Oko prepláchnite dostatočným množstvom roztoku, ale dbajte na to, aby kvapkadlo fľaštičky nikdy nepřišlo do kontaktu s povrchom oka.
2. Počkajte niekoľko sekúnd a postup niekoľkokrát opakujte.
3. Pre vyšší účinok môžete postup opakovat i niekoľkokrát denne.

Upozornenie:

- V prípade podráždenia nepokračujte v používaní Dr. Max Očnej vody a kontaktujte očného lekára.
- Nepoužívajte v prípade alergie alebo precitlivenosti na niektorú zo zložiek prípravku.
- Neprehŕtajte.
- Nedovoľte, aby sa fľaštička dotkla oka alebo očného viečka.
- Nemiešajte roztok s inými tekutinami.
- Nepoužívajte výrobok, keď máte nasadené kontaktné šošovky.
- Spotrebujte do 90 dní od otvorenia.
- Po každom použití fľaštičku starostlivo uzavrite.
- Pred každým použitím prepláchnite vyplachovaciu vaničku roztokom Dr. Max Očná voda.
- Skladujte v suchu pri teplote od 5 °C do 35 °C.
- Uskladňujte mimo dosahu malých detí.
- Uchovávejte mimo dosahu zdrojov tepla.
- Prípravok je sterilný do okamihu prvého otvorenia fľaštičky.
- Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na fľaštičke a škatuľke.

Zloženie:

Kyselina hyaluronová 0,02 %, Aloe vera gél, extrakt z očianky lekárskej (*Euphrasia officinalis*), edetát disodný, PHMB, izotonický pufovaný roztok s pH 7,2.
Neobsahuje: benzalkóniumchlorid, chlórhexidín, fenoxyletanol, timerosal.

Objem: 100 ml

Dátum poslednej revízie textu: 20/02/2024

STERILE A



MD



5 °C 35 °C

CE 0051



Omisan farmaceutici
Via Galilei, Guidonia M. (Rm)
Itálie/Taliansko
www.omisan.com

Distributor/Distribútor:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika

VER0224