

Femtime Vaginal Ovules CZ

Vaginální kuličky. Zdravotnický prostředek obsahující sodnou sůl kyseliny hyaluronové, polykarbofil, kyselinu mléčnou, vitamin E, kyselinu 18-beta-glycyrrhetinovou, čajovníkový olej (*tea tree*), fosfatidylcholin, polysyntetické triglyceridy.

Dr.Max⁺

NÁVOD K POUŽITÍ

Popis:

Femtime Vaginal Ovules jsou zdravotnický prostředek, který pomáhá udržovat přirozenou obranyschopnost vagíny a usnadňuje obnovu vaginální mikroflóry; obsahují kyselinu hyaluronovou a kyselinu mléčnou, které pomáhají odstranit příznaky způsobené nevyváženou hydratací a/nebo nevhodným pH v pochvě.

Kyselina hyaluronová ve formě sodné soli v dávce 10 mg/kulička vykazuje hydratační a lubrikační účinek při suchosti vaginální sliznice, přispívá k obnově přirozeného a komfortního poševního prostředí.

Kyselina mléčná, běžně se vyskytující v pochvě, podporuje okamžitou korekci pH a usnadňuje přirozenou regeneraci citlivého vulvovaginálního ekosystému.

Polykarbofil interagující s vaginálním hlenem může trvale uvolňovat vodíkové ionty přispívající ke snížení pH poševního prostředí.

Indikace:

Femtime Vaginal Ovules jsou užitečné při prevenci i léčbě suchosti vaginální sliznice nespecifického charakteru a při atrofické vaginitidě. Souběžně pomáhá i v případě podráždění, pálení a svědění v pochvě a u vaginálních potíží infekčního i zánětlivého charakteru. Indikace je pro ženy v reprodukčním věku, při menopauze nebo perimenopauze. Produkt je kompatibilní s kondomy.

Dávkování:

Vložte 1 kuličku do pochvy – optimálně večer před spaním po dobu 5-7 dní po skončení menstruace nebo podle doporučení lékaře.

Návod k použití:

- 1) Pořádně umyjte oblast pochvy před aplikací kuličky (ideálně kombinujte obojí – vnitřní výplach i vnější omytí);
- 2) Pečlivě si umyjte ruce a vyjměte 1 kuličku z blistru;
- 3) Jemně zaveďte kuličku hluboko do pochvy, nejlépe v poloze na zádech, aby nedošlo k vyklouznutí kuličky ven.

Způsob uchovávání:

Uchovávejte v řádně uzavřeném obalu na suchém místě, při teplotě od 5° C do 25° C, mimo zdroj světla a tepla.

Možné nežádoucí účinky:

Možná přecitlivělost na jakoukoli složku přípravku.

Upozornění:

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepolykejte. Nepoužívejte, pokud byl obal dříve otevřen nebo poškozen. Nepoužívejte produkt po uplynutí doby použitelnosti. Datum expirace se vztahuje na neotevřený a správně skladovaný produkt. Nepoužívejte produkt v případě vaginálních lézí a poranění v pochvě. V případě současného použití s jinými terapiemi, ať už s léky nebo zdravotnickými prostředky, byste se měli poradit se svým lékařem. Nepoužívejte produkt během menstruace. Nepřekračujte doporučené dávkování, pokud lékař neurčí jinak. Někdy, zejména po delší době používání, může dojít k přecitlivělosti. V takovém případě ukončete léčbu a vyhledejte lékaře, abyste zahájili správnou terapii. Je důležité informovat lékaře nebo lékárníka o jakýchkoli nežádoucích účincích, které nebyly uvedeny v návodu k použití. Nepoužívejte tento produkt déle než 30 po sobě jdoucích dnů.

Bezpečnostní opatření:

Během těhotenství, kojení a při použití u dětí musí být používání čípků omezeno, pouze pokud je to nezbytně nutné a pod přímou kontrolou vašeho lékaře. V případě neporušené panenské blány se před prvním použitím poraďte se svým gynekologem o konkrétním způsobu použití. Jedná se o přípravek pro jednorázové použití. V případě náhodného vypadnutí kuličky z pochvy ji znovu nepoužívejte.

Obsah balení:

Krabička se dvěma blistry obsahujícími 5 kuliček (10 kuliček/balení), 2 g/kulička.

Datum poslední revize: 12/2019

Femtime Vaginal Ovules SK

Vaginálne kapsuly. Zdravotnícka pomôcka obsahujúca sodnú soľ kyseliny hyaluronovej, polykarbofil, kyselinu mliečnu, vitamín E, kyselinu 18-beta-glycyrrhetinovú, olej z čajovníka, fosfatidylcholin, polysyntetické triglyceridy.

Dr.Max⁺

NÁVOD NA POUŽITIE

Popis:

Femtime Vaginal Ovules je zdravotnícka pomôcka, ktorá umožňuje zachovať prirodzenú obranyschopnosť vagíny a urýchliť obnovenie vaginálnej mikroflóry. Vďaka obsahu kyseliny hyaluronovej a kyseliny mliečnej pomáha odstrániť príznaky spôsobené nevyváženou vaginálnou hydrataciou a/alebo nevhodným pH v pošve.

Kyselina hyaluronová sa v prípravku nachádza vo forme sodnej soli v koncentrácii 10 mg/kapsula, ktorá zaisťuje hydratačný a lubrikačný účinok proti vaginálnej suchosti.

Kyselina mliečna, ktorá je v prostredí vagíny bežne prítomná, zaisťuje okamžitú korekciu pH a urýchľuje prirodzenú obnovu chlóstového vaginálneho prostredia.

Polykarbofil, ktorý interaguje s vaginálnym hlienom, môže uvoľňovať vodíkové ióny, ktoré prispievajú k zníženiu pH vo vaginálnom prostredí.

Indikácie:

Femtime Vaginal Ovules sa používajú pri prevencii a liečbe vaginálnej suchosti nešpecifického charakteru a v prípade atrofickej vaginitídy. Používajú sa v prípade podráždenia, pálenia, svrbenia a vaginálnych porúch infekčnej a zápalovej povahy. Indikované u žien v reprodukčnom veku, menopauze i perimenopauze. Výrobok možno používať súčasne s kondómami.

Dávkovanie:

Zaveďte 1 kapsulu denne do vagíny – najlepšie večer pred spaním – počas 5 – 7 dní po ukončení menštruačného cyklu alebo podľa rady lekára.

Návod na použitie:

- 1) Pred aplikáciou si riadne umyte oblasť vagíny (ideálne preveďte oplach vonkajších aj vnútorných rodidiel);
- 2) Riadne si umyte ruky a vyberte kapsulu;
- 3) Kapsulu zaveďte čo najhlbšie do vagíny, ideálne pri tom ležte, aby sa zabránilo jej vypadnutiu.

Spôsob skladovania:

Balenie skladujte uzatvorené na suchom mieste, mimo zdroja svetla alebo tepla. Teplota miestnosti by mala byť medzi 5 °C a 25 °C.

Vedľajšie účinky:

Možná přecitlivělost na akúkoľvek zložku prípravku.

Upozornenie:

Udržiavajte mimo dosahu detí. Neprehŕtajte. Nepoužívajte, ak je obal otvorený alebo poškodený. Prípravok nepoužívajte po uplynutí lehoty použiteľnosti. Dátum trvanlivosti sa vzťahuje na neotvorený a správne skladovaný produkt. Nepoužívajte v prípade akýchkoľvek poranení v oblasti vagíny. Pri súčasnej liečbe inými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami sa pred použitím poraďte so svojím ošetroujúcim lekárom. Nepoužívajte v období menštruácie. Bez porady s lekárom neprekračujte odporúčané dávkovanie. Dlhodobé používanie môže viesť k precitlivlosti. Ak sa tak stane, prestaňte s liečbou a poraďte sa so svojím lekárom. O akýchkoľvek vedľajších účinkoch, ktoré nie sú zmienené v tomto príbalovom letáku, informujte svojho lekára alebo lekárnika. Nepoužívajte dlhšie ako 30 po sebe idúcich dní.

Preventívne opatrenia:

U tehotných a dojčiacich žien a detí sa kapsuly používajú iba v nevyhnutných prípadoch a pod lekársym dohľadom. V prípade neporušenej panenskej blany sa o konkrétnych podmienkach používania poraďte so svojím gynekológom. Na jednorázové použitie. V prípade náhodného vypadnutia kapsuly ju znovu nepoužívajte.

Prezentácia:

Balenie s dvomi blistrami obsahujúcimi 5 vaginálnych kapsúl (10 kapsúl/balenie) 2 g/kapsula.

Dátum poslednej revízie: 12/2019

Distributor:

Dr.Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha 1, Česká republika



Distribútor:

Dr.Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha 1, Česká republika

