

Očný sprej

SK Návod na použitie

Dr.Max⁺

Dr. Max Očný sprej je sterilný solný roztok s fyziologickým pH na očné a periokulárne použitie.

Dr. Max Očný sprej preukázateľne pomáha odstraňovať periokulárne a očné sekréty u novorodencov, od prvých dní života, u dojčiat a detí (od narodenia do 6 rokov). Prípravok môžu používať aj deti staršie ako 6 rokov, mladiství, dospelí a starší ľudia, a to aj v prípade, že majú nasadené kontaktné šošovky.

Dr. Max Očný sprej pôsobí podaním očného roztoku a následným zmäkčením a odplavením sekrétov, ktoré sa nachádzajú na povrchu oka, v spojovkovej klenbe a na okrajoch viečka.

Dr. Max Očný sprej má riediaci, dekongestívny a hydratačný účinok a zvyšuje objem slzného filmu.

Dr. Max Očný sprej obsahuje vodné destiláty (hydroláty) z echinacey bledej a z očianky lekárskej, ktoré vďaka svojim hydratačným účinkom prispievajú ku zvlhčovaniu pôsobením prípravku.

Dr. Max Očný sprej je kompatibilný s mäkkými kontaktnými šošovkami.

ÚČEL URČENIA

Dr. Max Očný sprej je určený na odstránenie periokulárnych a očných sekrétov u novorodencov, od prvých dní života, u dojčiat a detí (od narodenia do 6 rokov). Prípravok môžu používať aj deti staršie ako 6 rokov, mladiství, dospelí a staršie osoby (t. j. osoby staršie ako 65 rokov).

Dr. Max Očný sprej je určený aj na upokojenie drobných očných ťažkostí.

INDIKÁCIE

Dr. Max Očný sprej je indikovaný:

- Na každodenné čistenie očných viečok a očí novorodencov, dojčiat a detí a na čistenie očí pri novorodeneckej konjunktivitíde.
- Na jednoduché odstránenie očných sekrétov alebo zvyškov nečistôt spôsobených zahustením hlienu alebo faktoriom životného prostredia, ako sú prach, peľ, alergény alebo soli.
- Na ľahšie odstránenie očných a periokulárnych sekrétov vznikajúcich v dôsledku zápalu očí alebo očných viečok (blefaritidy).
- Na odstránenie hnisavých sekrétov a riedenie slzného filmu v prípade stenôzy slzných kanálikov (časté u novorodencov).
- Na kontrolu mikrobiologickej záťaže obviazaného oka v prípade amblyopie vďaka zvýšeniu objemu slz a následnému zriedeniu mikroorganizmov. Počas liečby sa prípravok instiluje v intervale medzi dvoma previazmi a na zvlhčenie oka pri nosení kontaktných šošoviek.

Dr. Max Očný sprej je indikovaný aj na:

- Zmiernenie neprijemných pocitov v očiach a začervenania spojiviek spôsobené klimatickými podmienkami, ako je vietor, nadmerné teplo alebo nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu.
- Zmiernenie očných ťažkostí spôsobených sezónnymi alergiami a rôznymi formami alergickej konjunktivitidy.
- Zmiernenie pocitu pálenia, nepohodlia alebo svrbenia očí v dôsledku suchého oka spôsobeného faktormi životného prostredia.
- Na zmiernenie pocitu suchého oka/pocitu cudzieho telesa po farmakologickej liečbe.

Dr. Max Očný sprej možno používať aj niekoľkokrát denne.

ZLOŽENIE

Chlorid sodný (0,82 %), vitamín E TPGS, hydrolát z echinacey bledej (*Echinacea pallida*), hydrolát z očianky lekárskej (*Euphrasia officinalis*), heptahydrát síranu zinočnatého, monohydrát kyseliny citrónovej, tribázičky dihydrát citrátu sodného, voda na injekcie (WFI).

SPÔSOB POUŽITIA

- Pred použitím si dôkladne umyte a osušte ruky.
- Uchopte fláštičku tak, aby bol prst, ktorý používate na stlačenie rozprašovača (ukazovák alebo palec), správne umiestnený na rozprašovači a nezakrýval rozprašovací otvor.
- Držte fláštičku zvislo a silno stlačte rozprašovač, aby ste rozprášili roztok.
- V prípade priamej aplikácie do oka striekajte zo vzdialenosti asi 10 cm od oka.
- Pred prvou aplikáciou prípravku niekoľkokrát stlačte rozprašovač, kým nedocielite pravidelný rozstrek prípravku.

• V prípade skladovania pri teplotách pod 15 °C a pri použití u detí podržte fláštičku pred použitím chvíľu v ruke, aby sa zahriala a dieťa nebolo vystavené nepriemernému pocitu chladu.

• Prípravok používajte nasledujúcim spôsobom:

- **Na vylpach očí namiesto bežných navlhčených či namočených obrúskov:** aplikujte 1 alebo 2 vstreky roztoku na sterilnú gázu a použite ju na okamžitú a jemné očistenie oblasti okolo očí, čím odstránite všetky sekréty. Vyvarujte sa silného trenia. Zaschnuté sekréty zmäknúce namočenou gázou, kým sa nebudú dať odstrániť. Na každé oko použite inú gázu.
- **Na vylpach očí:** aplikujte 1 alebo 2 vstreky prípravku do každého oka, otvoreného alebo zatvoreného:
 - a. aplikácia do otvoreného oka, keď vďaka žmurkaniu spôsobenému zväčšením objemu slznej tekutiny umožňuje prípravku omýť povrch oka a spolu s prebytkom tekutiny odstrániť cudzie častice;
 - b. aplikácia do zavretého oka, keď sa tekutina, ktorá zostane zachytená v okrají viečka, dostane žmurkaním do styku s povrchom oka, čím zväčší objem slznej tekutiny a prípravok tak zmýje spolu s prebytkom tekutiny z povrchu oka cudzie častice.
- **Na zmiernenie nepriemerných pocitov alebo začervenania:** aplikujte 1 alebo 2 vstreky prípravku do každého oka.

• Po prvom otvorení je možné obsah fláštičky používať opakovane po dobu 3 mesiacov.

UPOZORNENIE A PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Prípravok je určený len na oftalmologické alebo periokulárne použitie.
- Určené na použitie jednou osobou.
- Nepoužívajte prípravok, ak je fláštička poškodená alebo ak nie je pred prvým otvorením dokonale uzavretá.
- Počas používania sa nedotýkajte rozprašovacím otvorom očí ani iných povrchov.
- Nepoužívajte prípravok po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.
- V prípade výskytu nežiaducich účinkov počas používania prerušte liečbu a poraďte sa s lekárom.
- Nepoužívajte prípravok v prípade známej neznášanlivosti na niektorú zo zložiek roztoku a/alebo rastlín z čeľade astrovité (*Asteraceae*) a/alebo zárazovité (*Urticaceae*).
- Nie sú hlásené žiadne interakcie s liekmi alebo inými očnými kvapkami; avšak medzi aplikáciami akýchkoľvek iných očných kvapiek ponechajte interval aspoň 15 minút.
- Prípravok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa nakladania s odpadmi.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Ak ste tehotná alebo dočíte, pred použitím tohto produktu sa poraďte so svojim lekárom.
- Len na vonkajšie použitie, neprehliadajte.
- Nemanipulujte s fláštičkou a jej mechanizmami, ani ich nepoškozujte.
- **Dr. Max Očný sprej** nenahrádza žiadnu liekovú terapiu predpísanú vašim lekárom.
- Prípadnú závažnú nehodu nahláste výrobcom a príslušnému úradu členského štátu, v ktorom sa nachádzate.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Doteraz nie sú známe žiadne nežiaduce vedľajšie účinky.

SKLADOVACIE PODMIENKY

Výrobok uchovávať v suchu pri teplote od 2 °C do 30 °C a mimo dosahu priameho tepla a slnečného žiarenia. Po prvom otvorení je možné obsah fláštičky používať opakovane po dobu 3 mesiacov.

BALENIE

Jedna fláštička s objemom 10 ml s rozprašovačom obsahujúca sterilný roztok bez konzervačných látok.

ČAS POUŽITELNOSTI

Pri neotvorenom balení neprekračujte dátum expirácie uvedený na obale.

Dátum poslednej revízie: 02.01 z 10/2022

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 - 40019
Sant'Agata Bolognese (BO),
Taliansko

Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika

CE 0051

MD

STERILE A

#

DT/01/DT/005

VER023