

Dr. Max Thermoplaster

74 Návod k použití

Návod k použití si, prosím, pečlivě přečtěte a uchovejte!

Hřejivá náplast

Snadná a rychlá pomoc pro zmírnění bolesti kloubů a svalů, při svalové horečce, ztuhlosti a natažení svalů, při bolestech zad a menstruačních potížích.

- Samozahřívací.
- Dlouhotrvající, rovnoměrné a příjemné teplo trvající až 12 hodin.
- Působí do hloubky a relaxačně.

Obsahuje (dle zakoupeného produktu):

- Hřejivou náplast: 6 ks (ca. 13 x 9,5 cm) k jednorázovému použití.
- Hřejivou náplast: 4 ks (ca. 29 x 9 cm) k jednorázovému použití.

Způsob použití:

Očistěte a osušte pokožku v místě aplikace náplasti. Rukama (nikoli nožem či nůžkami) otevřte vzduchotěsné balení a vyjměte hřejivou náplast z obalu. Sejměte ochranou fólii a lepicí stranou přiložte na kůži v místě bolesti.

K zahřívání dochází postupně. Po ca 30 minutách je dosaženo maximální teploty, která vydrží minimálně 12 hodin. Teplo se aktivuje pomocí vzduchu, proto by se vzduchotěsné balení mělo rozbalit bezprostředně před použitím hřejivé náplasti.

Bezpečnostní opatření:

- Pokud máte cukrovku, oběhové potíže, srdeční onemocnění, revmatoidní artritidu, nervové poškození nebo jste těhotná, zkonkultujte použití hřejivé náplasti s lékařem.
- Hřejivá náplast je určena k vnějšímu použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
- Odstraňte náplast, je-li teplota nepřijemná.
- Hřejivé náplasti jsou určeny pouze k jednorázovému použití.
- Obsah balení může být při spolknutí nebo přímém kontaktu s pokožkou škodlivý. Při neúmyslném požití obsahu, kontaktu s pokožkou nebo očima produkt odstraňte, vypláchněte zasaženou oblast vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud se po aplikaci objeví na pokožce lehké zarudnutí, což je normální, nechte ho před dalším použitím nejprve odeznít.
- Od 55 let stoupá citlivost pokožky. Hřejivá náplast by se proto měla aplikovat na tenký oděv.
- Skladujte při pokojové teplotě.
- Respektujte datum minimální trvanlivosti uvedené na obalu.
- Likvidujte spolu s běžným odpadem.

Upozornění:

Při nesprávném použití může i při nízké teplotě dojít k popáleninám. Řiďte se proto návodem k použití a kontrolujte aplikaci v pravidelných intervalech. Nevytvářejte na náplast nadměrný

tlak. Okamžitě přerušte aplikaci, je-li Vám nepříjemně horko, tvoří-li se Vám vyrážka nebo se necítíte dobře. Osoby, které si hřejivou náplast nemohou samy sundat, např. starší nebo postižené osoby, by měly být během aplikace pečlivě sledovány. Přestaňte náplast používat a obraťte se na svého lékaře, pokud se po týdnu Vaše bolest nezlepší.

Nepoužívejte:

- Déle než 12 hodin v průběhu 24 hodin.
- U dětí mladších 12 let.
- Na místě se zánětem, pohmožděninami, zarudnutím, otokem, modřinami a na podrážděnou a poškozenou kůži.
- Na místě, kde necítíte teplo.
- V kombinaci s léčivými a kosmetickými krémy, které se nanášejí na pokožku.
- Nepoužívejte při omezené teplotní citlivosti, při arteriálních poruchách prokrvení a Raynaudově syndromu.
- Pokud si daná osoba nemůže produkt sama sundat.
- Je-li produkt poškozený.
- Ve spánku.
- Při magnetické rezonanci.

Hřejivou náplast nikdy:

- Nestíhajte, netrhajte, nepalte, nehnette, nekrcíte.
- Nezhřívajte v mikrovlnné troubě nebo s pomocou iných teplotných zdrojů.
- Nedávajte do kontaktu s vodou alebo jinými tekutinami.

Obsažené látky:

železo, voda, křemelina, aktivní uhlí, chlorid sodný

	Výrobce		Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii
	Číslo šarže		Datum expirace
	Znaky a symboly označující „nepoužívat opakovaně“		Znaky „Nepoužívejte v případě poškození obalu“
	0197 Značka CE		



Koolcare Technology Co., Ltd

Adresa: No.6-10, A5, Shandong International Tech Park,
South Waihuan Road, Linyi, Shandong, Čína (276017)



Prolinx GmbH

Adresa: Brehmstr. 56, 40239, Düsseldorf, Německo

Datum poslední revize: 05/20

Zdravotnický prostředek.

Dr. Max Thermoplaster

SK Návod na použití

Návod na použití si, prosím, pozorně přečtěte a uchovajte!

Hřejivá náplast

Jednoduchá a rychlá pomoc na zmiernenie bolesti kĺbov a svalov, pri svalovej horúčke, stuhnutosti a natiahnutí svalov, pri bolestiach chrbta a menštruačných ťažkostiach.

- Samozahrievacia.
- Dlhhotrvajúca, rovnomerné a príjemné teplo trvajúce až 12 hodín.
- Pôsobí do hĺbky a relaxačne.

Obsahuje (podľa kúpeného produktu):

- Hrejivú náplast: 6 ks (cca 13 x 9,5 cm) na jednorazové použitie.
- Hrejivú náplast: 4 ks (cca 29 x 9 cm) na jednorazové použitie.

Spôsob použitia:

V bolestivej oblasti očistite a osušte pokožku. Rukami (nie nožom či nožnicami) otvorte vzduchotesné balenie a vyberte z neho hrejivú náplast. Zložte ochrannú fóliu a lepiťov stranou priľože na bolestivé miesto. Teplo sa aktivuje pomocou vzduchu, preto by sa vzduchotesné balenie malo rozbaľiť bezprostredne pred použitím hrejivej náplasti.

Zahrievaniu dochádza postupne. Po cca 30 minútach sa dosiahne maximálna teplota, ktorá vydrží minimálne 12 hodín.

Bezpečnostné opatrenia:

- Ak máte cukrovku, ťažkosti s krvným obehom, srdcové ochorenie, reumatoidnú artritídu, nervové poškodenie alebo ste tehotná, poraďte sa pred použitím hrejivej náplasti s lekárom.
- Hrejivá náplast je určená na vonkajšie použitie.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Odstraňte náplast, ak vám je teplota neprijemná.
- Hrejivé náplasti sú určené iba na jednorazové použitie.
- Obsah balenia môže byť pri prehltnutí alebo priamom kontakte s pokožkou škodlivý. Pri neúmyselnom požití obsahu, kontakte s pokožkou alebo očami produkt odstraňte, vypláchnite zasiahnutú oblasť vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pokiaľ sa po aplikácii objaví na pokožke ľahké začervenanie, čo je bežný jav, nechajte ho pred ďalším použitím najprv odeznieť.
- Od 55 rokov sa zvyšuje citlivosť pokožky. Hrejivá náplast by sa preto mala aplikovať na tenký oděv.
- Skladujte pri izbovej teplotě.
- Respektujte dátum spotreby uvedený na obale.
- Likvidujte spolu s bežným odpadom.

Upozornenie:

Pri nesprávnem použití môže aj pri nízké teplotě dojít k popáleninám. Riadte sa preto návodom na použitie a kontrolujte aplikáciu v pravidelných intervalech. Nevytvárajte na

náplast nadmerný tlak. Ak je vám neprijemne horúco, ak sa vám tvoří vyrážka alebo sa necítíte dobre, prestaňte náplast používať. Osoby, ktoré si hřejivou náplast nemohou sami zložit, např. staršíe alebo postihnuté osoby, by mali být počas aplikace starostlivo sledované. Přestaňte náplast používat a obraťte sa na svojho lékaře, pokiaľ sa po týždni vaša bolesť nezlepší.

Nepoužíajte:

- Dlhšie než 12 hodín počas dňa (24 hodín).
- U detí mladších ako 12 rokov.
- Na mieste so zápalom, pomliaždeninami, začervenaním, opuchom, modřinami a na podrážděnou a poškozenou pokožku.
- Na mieste, kde necítite teplo.
- V kombinácii s léčivými a kozmetickými krémy, které sa nanášajú na pokožku.
- Nepoužívejte pri obmedzenej teplotnej citlivosti, pri arteriálnych poruchách prekrvenia a Raynaudovom syndróme.
- Ak si daná osoba nemôže produkt sama zložiť.
- Ak je produkt poškodený.
- V spánku.
- Pri magnetickej rezonancii.

Hřejivou náplast nikdy:

- Nestihajte, netrhajte, nepáľte, nehnette, nekrcíte;
- Neohrievajte v mikrovlnnej rúre alebo pomocou iných vonkajších vplyvov;
- Nevystavujte kontaktu s vodou alebo inými tekutinami

Zloženie:

železo, voda, křemelina, aktivní uhlíe, chlorid sodný

	Výrobca		Autorizovaný zástupca pre Európsku úniu
	Číslo šarže		Dátum spotreby
	Znaky a symboly označujúce „nepoužívať opakovaně“		Znaky „Nepoužívejte v prípade poškodenia obalu“
	0197 Značka CE		



Koolcare Technology Co., Ltd

Adresa: No.6-10, A5, Shandong International Tech Park,
South Waihuan Road, Linyi, Shandong, Čína (276017)



Prolinx GmbH

Adresa: Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf, Nemecko

Dátum poslednej revízie: 05/20

Zdravotnícka pomôcka.