

Mořská voda - izotonická

CZ Dr.Max Mořská voda - izotonický nosní sprej

Správná hygiena nosu je důležitá pro dospělé, děti i kojence. Velké množství hlenu v nosních dutinách může zvyšovat množení mikrobů a vyvolat nadměrnou suchost nosní sliznice.

Přípravek **Dr.Max Mořská voda** díky mechanickému působení silně hydratuje nosní dutiny a pomáhá s vyplavováním a odstraňováním hlenu, a tím zlepšuje průchodnost nosních cest.

Přípravek **Dr.Max Mořská voda** si zachovává specifitu důležitých vlastností přírodní mořské vody.

Přípravek **Dr.Max Mořská voda** pochází ze zátoky Cancale v Bretani, která je vyhlášena vysokou kvalitou vody. Zátoka Cancale se vyznačuje výjimečnou výškou přílivu (12 m) a je neustále vymývaná silnými převládajícími proudy, které chrání vodu v zátokě před znečištěním. Díky této jedinečné kombinaci okolnosti se voda neustále čistí a dosahuje trvale vysoké čistoty. Odběr vzorků se provádí automaticky v době, kdy je kvalita vody optimální (po vysokém přílivu). Oblast sběru vzorků se podle klasifikace řadí do třídy A a podléhá průběžným kontrolám z hlediska zdravotní nezávadnosti (mikrobiologická kontrola, chemická kontaminace, fytoplankton, pH...).

Šložení: Čištěná voda a mořská voda (0,9 % chloridu sodného).

Indikace: Správné použití přípravku **Dr.Max Mořská voda** při každodenní nosní hygieně u kojenců, dětí a dospělých umožňuje terapeutickou pomoc u některých základních indikací, jako jsou: nazofaryngitida, obstrukční rýma, zánět vedlejších nosních dutin, suchost nosu a chrapot v důsledku suchých sliznic, a jako pomůcka v ORL a při pediatrické léčbě.

Návod k použití:

1. Před použitím protřepejte lahvičku a sejměte ochranný kryt. Při prvním použití může být zapotřebí několikrát opakovaně stlačit aplikátor, aby se přípravek homogenizoval.
 2. Opatrně vložte nosní aplikátor do jedné nosní dírky a stisknutím pumpičky aplikujte přípravek.
 3. Nechte přebytečný roztok odtéct, aby se vyplavil hlen, a poté se vysmrkejte.
 4. Opakujte postup s druhou nosní dírkou.
 5. Očistěte špičku aplikátoru vodou a osušte.
 6. Nosní aplikátor zakryjte ochranným krytem až do dalšího použití.
- Aplikujte do každé nosní dírky tak často, jak bude zapotřebí.

Kontraindikace a nežádoucí účinky:

- Při doporučených terapeutických dávkách dosud nebyly popsány žádné nežádoucí účinky, nicméně pokud se u vás vyskytnou nežádoucí účinky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
- Jakékoli závažné nežádoucí účinky spojené s tímto přípravkem musí být hlášeny výrobci, distributorovi a kontrolnímu zdravotnímu úřadu v příslušné zemi.

Varování a bezpečnostní opatření:

- Z hygienických důvodů a pro zamezení přenosu patogenů by tento výrobek neměl být používán více než jednou osobou.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávání a datum použitelnosti:

- Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabici a na lahvičce.
- Uchovávejte na suchém a chladném místě.
- Zlikvidujte do jednoho měsíce po otevření.
- Lahvičku a ochranný kryt odložte do příslušné nádoby na odpad.

Balení:

Izotonický nosní sprej **Dr.Max Mořská voda** 30 ml bez hnačícího plynu je k dispozici ve formátu:

- dospělí a děti od 6 let věku.

Datum revize: 27.01.2021



Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - ŠPANIJSKO
Zákaznický servis: +34 666 570 401

Distributor: Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Morská voda - izotonická

SK Dr.Max Morská voda - izotonický nosový sprej

Správná hygiena nosa je dôležitá pre dospelých, deti aj dojčatá. Veľké množstvo hlienu v nosových dutinách môže zvyšovať množenie mikróbov a vyvolať nadmernú suchosť nosovej sliznice.

Pripravok **Dr.Max Morská voda** vďaka mechanickému pôsobeniu značne hydratuje nosové dutiny a pomáha pri vyplavovaní a odstraňovaní hlienu, čím zlepšuje priechodnosť nosových ciest.

Pripravok **Dr.Max Morská voda** si zachováva špecifickosť dôležitých vlastností prírodnej morskej vody.

Pripravok **Dr.Max Morská voda** pochádza zo zátoky Cancale v Bretónsku, ktorá je známa vysokou kvalitou vody. Zátoka Cancale sa vyznačuje výnimočnou výškou prílivu (12 m) a je neustále vymývaná silnými prevládajúcimi prúdmi, ktoré chránia vodu v zátok pred znečistením. Vďaka tejto jedinečnej kombinácii okolností sa voda neustále čistí a dosahuje trvale vysokú čistotu. Odber vzoriek sa vykonáva automaticky v čase, keď je kvalita vody optimálna (po vysokom prílive). Oblast zberu vzoriek sa podľa klasifikácie radí do triedy A a podlieha priebežným kontrolám z hľadiska zdravotnej neškodnosti (mikrobiologická kontrola, chemická kontaminácia, fytoplankton, pH atď.).

Zloženie: Čistená voda a morská voda (0,9 % chloridu sodného).

Indikácie: Správne použitie prípravku **Dr.Max Morská voda** pri každodennej nosovej hygiene dojčiat, detí a dospelých slúži ako liečebná pomôcka pri niektorých základných indikáciách, ako je nazofaryngitída, obštrukčná nádcha, zápal vedľajších nosových dutín, suchosť nosa a chrapot v dôsledku suchých slizníc a ako pomôcka v ORL a pri pediatrickej liečbe.

Návod na použitie:

1. Pred použitím potraťte fláštičku a zložte ochranný kryt. Pri prvom použití môže byť potrebné niekoľkokrát opakovaně stlačiť aplikátor, aby sa prípravok homogenizoval.
 2. Opatrne vložte nosový aplikátor do jednej nosovej dierky a stlačením pumpičky aplikujte prípravok.
 3. Přebytečný roztok nechajte odtiecť, aby sa vyplavil hlien, a potom sa vysiakajte.
 4. Opakujte postup s druhou nosovou dierkou.
 5. Očistite špičku aplikátoru vodou a osušte.
 6. Nosový aplikátor zakryte ochranným krytom až do ďalšieho použitia.
- Aplikujte do každej nosovej dierky tak často, ako bude potrebné.

Kontraindikácie a nežiaduce účinky:

- Pri odporúčaných terapeutických dávkach neboli doteraz hlásené žiadne nežiaduce účinky. Ak sa však u vás vyskytnú nežiaduce účinky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Akékoľvek závažné nežiaduce účinky spojené s týmto prípravkom sa musia hlásiť výrobcovi, distributorovi a kontrolnému zdravotnému úradu v príslušnej krajine.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia:

- Z hygienických dôvodov a na zamedzenie prenosu patogénov by tento výrobok nemala používať viac ako jedna osoba.
- Uchovávať mimo dosahu detí.

Skladovanie a dátum expirácie:

- Nepoužívať výrobok po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na škatulke a na fláštičke.
- Uchovávať na suchom a chladnom mieste.
- Zlikvidujte do jedného mesiaca po otvorení.
- Fláštičku a ochranný kryt odložte do príslušnej nádoby na odpad.

Balenie:

Izotonický nosový sprej **Dr.Max Morská voda** 30 ml bez hnačacieho plynu je dostupný:

- pre dospelých a deti od 6 rokov.

Dátum revízie: 27.01.2021



Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - ŠPANIJSKO
Zákaznický servis: +34 666 570 401

Distribútor: Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

