



Denture disinfection tablets

Tablety pro péči o zubní náhrady

 Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod k použití.

PRO32 Denture disinfection tablets jsou šumivé tablety s aktivním kyslíkem určené pro každodenní čištění a dezinfekci zubních náhrad. Jejich antibakteriální složení účinně odstraňuje až 99,9 % bakterií, které způsobují zápach a zubní plak. Používání tablet zabraňuje tvorbě zubního kamene.

Návod k použití:

1. Vyjměte zubní náhradu z úst.
2. Náhradu očistěte zubním kartáčkem a opláchněte.
3. Umístěte náhradu do sklenice (100–200 ml).
4. Naplňte sklenici teplou vodou (přibližně 35 °C), dokud není náhrada zcela ponořena.
5. Rozpusťte ve sklenici jednu šumivou tabletu. Náhradu ponechte v roztoku po dobu nejméně 10-15 minut. Pro lepší účinnost můžete nechat zubní náhradu v roztoku celou noc.
6. Zubní náhradu vyjměte z roztoku a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
7. Čistící nádobu vyprázdněte a vypláchněte.

 **Skladování a upozornění:** Uchovávejte na chladném a suchém místě. Proces čištění je ukončen po 10-15 minutách, i když tableta není zcela rozpuštěna. Pokud provádíte čištění zubní náhrady přes noc, dochází k zbarvení čističeho roztoku. Pouze pro vnější použití. Nevkládejte tablety do úst. Nepijte čističí roztok. Nepoužívejte v případě precitlivlosti na kteroukoli složku přípravku. Způsobuje vážné podráždění očí. Po použití si důkladně umyjte ruce. Uchovávejte mimo dosah dětí a osob, které mohou omylem polknout tabletu nebo čističí roztok.

První pomoc: V případě kontaktu s očima několik minut vyplachujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte je z očí a pokračujte ve vyplachování. V případě přetrvávajícího podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře. Vypláchněte ústa a nevyvolávejte zvracení! Při podráždění kůže důkladně omyjte postiženou oblast a vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: Hydrogenperoxosíran draselný, hydrogenuhlíčan sodný, kyselina citronová, uhlíčan sodný, sorbitol, VP/VA kopolymer, laurylsulfát sodný, laurylsulfoacetát sodný, aroma, CI 73015.

 bmp production gmbh, Neuhofer Weiche 48, D-19370 Parchim, Germany

Distributor:

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Tablety na starostlivosť o zubné náhrady

 Pred použitím si prosím pozorně prečítajte návod na použitie.

PRO32 Denture disinfection tablets sú šumivé tablety s aktívnym kyslíkom určené pre každodenné čistenie a dezinfekciu zubných náhrad. Ich antibakteriálne zloženie účinne odstraňuje až 99,9 % baktérií, ktoré spôsobujú zápach a zubný plak. Používanie tablet zabraňuje tvorbe zubného kameňa.

Návod na použitie:

1. Vyberte zubnú náhradu z úst.
2. Náhradu očistite zubnou kefkou a opláchnite.
3. Umiestnite náhradu do pohára (100–200 ml).
4. Naplňte pohár teplou vodou (približne 35 °C), až kým nie je náhrada úplne ponorená.
5. Rozpusťte v pohári jednu šumivú tabletu. Náhradu ponechajte v roztoku po dobu najmenej 10-15 minút. Pre lepšiu účinnosť môžete nechať zubnú náhradu v roztoku celú noc.
6. Zubnú náhradu vyberte z roztoku a dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
7. Čistiacu nádobu vyprázdnite a vypláchnite.

 **Skladovanie a upozornenie:** Uchovávať na chladnom a suchom mieste. Proces čistenia je ukončený po 10-15 minútach, aj keď tableta nie je úplne rozpuštená. Ak vykonávate čistenie zubnej náhrady cez noc, dochádza k sfarbeniu čistiaceho roztoku. Len na vonkajšie použitie. Nevkladajte tablety do úst. Nepite čistiaci roztok. Nepoužívať v prípade precitlivlosti na ktorúkoľvek zložku prípravku. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Po použití si dôkladne umyte ruky. Uchovávať mimo dosahu detí a osôb, ktoré môžu omylom prehltnúť tabletu alebo čistiaci roztok.

Prvá pomoc: V prípade kontaktu s očami niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak nosíte kontaktné šošovky, vyberte ich z očí a pokračujte vo vyplachovaní. V prípade pretrvávajúceho podráždenia očí vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade požitia kontaktujte toxikologické centrum alebo lekára. Vypláchnite ústa a nevyvolávajte zvracanie! Pri podráždení pokožky dôkladne umyte postihnutú oblasť a vyhľadajte lekársku pomoc.

Zloženie: Hydrogenperoxosíran draselný, hydrogenuhlíčan sodný, kyselina citrónová, uhlíčan sodný, sorbitol, VP/VA kopolymér, laurylsulfát sodný, lauryl sulfoacetát sodný, aróma, CI 73015.

 bmp production gmbh, Neuhofer Weiche 48, D-19370 Parchim, Germany

Distribútor:

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika