

CZ Návod k použití fyziologického roztoku

Dr.Max Physio Solution je roztok v jednorázových dávkách bez konzervačních látek nebo pufrovacích činidel, které působí čistě mechanickým principem, a proto je indikován zvláště u lidí, kteří mají citlivé oči a nosní dírký.

Hlavní funkce Dr.Max Physio Solution jsou:

U kontaktních čoček:

- zabránění dehydratace hydrofilních kontaktních čoček,
- opláchnutí všech typů kontaktních čoček,
- vhodný pro rozpouštění enzymových tablet.

Oční podání:

- zmírnění nepříjemných pocitů z nepříznivých podmínek prostředí, jakým je prostředí s klimatizací/topením, suché prostředí, zakouření prostředí atd.

Zvlhčení nosní sliznice:

- symptomatická úleva zvýšené sekrece z nosu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Oddělte ampulku výrobku, právě umytými rukama ji otočením horní části otevřete a zajistíte, aby nepřišla do styku s žádným povrchem.

Opláchnutí kontaktních čoček a rozpouštění enzymových tablet:

- Opláchnutí: Po dokončení procesu čištění nebo kdykoli je to nutné, položte kontaktní čočky na dlaň ruky, dostatečným proudem fyziologického roztoku je opláchněte a špičkami prstů je otřete.
- Rozpouštění enzymových tablet. Roztok použijte podle návodu výrobce k použití enzymových tablet.

Přímé použití na povrchu oka:

- K uvolnění několika kapek Dr.Max Physio Solution na povrch oka s kontaktní čočkou nebo bez ní ampulku stlačte tolikrát, kolikrát je potřeba.
- Omytí víček: Stlačením ampulky namoťte sterilní gázu Dr.Max Physio Solution a naneste namočenou gázu na víčko.

Přímé použití v nosních dírkách:

- Zakloňte hlavu dozadu.
- Vložte trysku do jedné z nosních dírek a ampulku s jednorázovou dávkou mírně stlačte. Stejný postup opakujte i u druhé nosní dírký. Narovnejte hlavu, aby se uvolnily všechny hleny a otřete vytékající přebytečné množství roztoku.
- Během 10 minut po podání silně nesmrkejte. U kojenců přípravek podávejte s minimálním tlakem na ampulku, aby se zabránilo riziku infekce středního ucha.

OPATŘENÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento výrobek neobsahuje konzervační látký. Po otevření ampulky ihned použijte. Po použití veškerý zbývající roztok zlikvidujte, jelikož by mohl být kontaminován a jeho použití by mohlo vést k infekci.
- Jedna ampulka musí být použita pouze tou samou osobou.
- Stejná ampulka nesmí být současně použita k léčbě očí i nosních dírek.
- Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.
- Nepoužívejte, pokud je ampulka poškozená.
- V případě podráždění očí nebo nosních dírek se poraďte s odborníkem.
- Neskladujte při teplotách nad 25 °C.

SOLOŽENÍ

Sterilní roztok chloridu sodného v koncentraci 0,9%.

SK Návod na použitie fyziologického roztoku

Dr.Max Physio Solution je roztok vo forme jednej dávky bez konzervačných látok alebo pufrovacích činidiel, ktoré pôsobia prostredníctvom sil mechanického odporu, a preto je indikovaný najmä pre pacientov s citlivými očami a nosnými dierkami.

Hlavné funkcie Dr.Max Physio Solutionu sú:

V prípade kontaktných šošoviek:

- zabráňuje dehydratácii hydrofilných kontaktných šošoviek,
- oplachujú sa nim všetky typy kontaktných šošoviek,
- je vhodný na rozpúšťanie enzymatických tabliet.

Očná instilácia:

- znižuje nepohodlie vyplývajúce z nepriaznivých environmentálnych podmienok, ako sú prostredia s klimatizáciou/kúrením, suché prostredie, dymové prostredie atď.

Zvlhčovanie nosa:

- symptomatická úľava nosového kataru.

NÁVOD NA POUŽITIE

Oddelte ampulku produktu a otvoríte ju čerstvo umytými rukami otočením hornej časti, pričom zaistíte, aby sa ampulka nedostala do styku so žiadnym povrchom.

Oplachovanie kontaktných šošoviek a rozpúšťanie enzymatických tabliet:

- Oplachovanie: Po dokončení procesu čistenia alebo vždy, keď je to potrebné, položte kontaktnú šošovku na dlaň ruky a opláchnite ju prúdom veľkého množstva fyziologického roztoku, pričom ju trite končekmi prstov.
- Rozpustite enzymatické tablety. Roztok používajte podľa pokynov výrobcu na použitie enzymatických tabliet.

Priame použitie na povrchu očí:

- Buď s kontaktnými šošovkami umiestnenými na oku, alebo bez nich, vyvíňte mierny tlak na ampulku, aby sa uvoľnilo toľko kvapiek Dr.Max Physio Solution na povrch oka, koľko je to potrebné.
- Umyvanie očných viečok: Vyvíňte tlak na ampulku a namoťte sterilnú gázu vo Dr.Max Physio Solution. Nasiaknutú gázu aplikujte na viečko.

Priame použitie v nosných dierkach:

- Hlavu zakloňte dozadu.
- Vložte ústie na vstrekovanie do každej nosnej dierky a vyvíňte mierny tlak na ampulku s jednou dávkou. Rovnaký postup zopakujte aj pri druhej nosnej dierke. Narovnejte hlavu, aby sa mohli uvoľniť všetky upchaté hleny a aby vytiekol prebytočný produkt.
- V priebehu 10 minút po podaní nefúkajte nos nasilu. V prípade dočiat vyvíjajte minimálny tlak na ampulku, aby sa zabránilo riziku kontaminácie stredného ucha.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Uchovávejte mimo dosahu detí.
- Tento produkt neobsahuje konzervačné látký. Použite ihneď po otvorení ampulky. Všetok zostávajúci roztok po použití zlikvidujte, pretože môže byť kontaminovaný a jeho použitie môže spôsobiť infekciu.
- Jedna ampulka sa smie použiť len u tej istej osoby.
- Tá istá ampulka sa nesmie používať na ošetrovanie očí a nosných dierok súčasne.
- Nepoužívajte po dátume expirácie.
- Ak sa ampulka zdá byť poškodená, produkt nepoužívajte.
- V prípade podráždenia sa poraďte so špecialistom.
- Neskladujte pri teplotách nad 25 °C.

ZLOŽENIE

Sterilný roztok chloridu sodného s koncentráciou 0,9%.

Výrobce/Výrobca/Producent/Fabricantul:

 UNOLAB MANUFACTURING, S.L.
Av/ De las flores 6, 28970
Humanes de Madrid (Madrid), Spain

CZ SK Distributor/Distribútor:

Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika

PL Dystrybutor:

Dr.Max Sp. z o.o.,
ul. Krzemieniacka 60a,
54-613 Wrocław, Polska

RO Distributor:

MEDIPLUS EXIM SRL,
Str. Ciobanului nr. 133,
Mogoșoaia, Ilfov, România