

**Dr.Max⁺**

Femtime[®] Vaginal Gel

Vaginální lubrikační gel

CZ

Návod k použití

Přípravek **Dr.Max Femtime[®] Vaginal Gel** je indikován v případě vaginální suchosti. Má lubrikační, zvlhčující a ochranný účinek na vaginální sliznici. Zabraňuje příznakům spojeným s vaginální suchostí, které se obvykle projevují podrážděním a pálením, a zmírňuje je. Je vhodný zejména před pohlavním stykem s cílem snížit tření a zabránit podráždění, pohmoždění a bolestivým pocitům způsobeným nadměrnou vaginální suchostí. S vyváženým pH a osmolaritou napomáhá k udržení fyziologické rovnováhy ve vaginální oblasti.

Složení

Čištěná voda, hydroxyethylcelulóza, hyaluronát sodný, propylenglykol, xanthanová guma, guarová guma, chlorid sodný, kyselina mléčná, laktát sodný, fenoxietanol, ethylhexylglycerin. Bez parfemace.

Způsob použití

Před aplikací si důkladně umyjte ruce. Aplikujte pomocí konečků prstů do perineální oblasti, vulvy a do přední části vagíny a kruhovými pohyby jemně masírujte bez oplachování. Po použití uzavřete. Může být aplikován ráno, večer nebo podle potřeby, zejména těsně před pohlavním stykem. V případě bolestivého pohlavního styku se doporučuje předběžná aplikace oběma partnerům.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Skladujte na suchém a chladném místě, chráněný před světlem a mimo dosah zdrojů tepla. Datum expirace se vztahuje na přípravek řádně skladovaný v neporušeném obalu. Po otevření spotřebujte přípravek do 9 měsíců.

Upozornění

Nepoužívejte v případě přecitlivlosti na složky přípravku. V případě nežádoucích reakcí přerušete léčbu a poraďte se s lékařem. Použití během těhotenství a kojení předem konzultujte s lékařem. Neobsahuje spermicidně působící látky a nemá antikoncepční účinek. Přípravek nepoužívejte během menstruace. Bez předchozí konzultace se svým lékařem přípravek nepoužívejte současně s jinou lokální gynekologickou léčbou. Užívání přípravku není indikováno před nástupem první menstruace (menarche). Nepoužívejte přípravek v případě výskytu lézí vaginální sliznice. Nepoužívejte po uplynutí data expirace uvedeného na obalu. Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

50 ml

Datum poslední revize: březen 2022

Femtime[®] Vaginal Gel

Vaginálny lubrikačný gél

SK

Návod na použitie

Přípravok **Dr.Max Femtime[®] Vaginal Gel** je indikovaný v prípade vaginálnej suchosti. Má lubrikačný, zvlhčujúci a ochranný účinok na vaginálnu sliznicu. Zabraňuje príznakom spojených s vaginálnou suchosťou, ktoré sa obvyčajne prejavujú podráždením a pálením, a zmierňuje ich. Je vhodný najmä pred pohlavným stykom s cieľom znížiť trenie a zabrániť podráždeniu, pomliaždeniu a bolestivým pocitom spôsobeným nadmernou vaginálnou suchosťou. S vyváženým pH a osmolaritou pomáha udržaniu fyziologickej rovnováhy vo vaginálnej oblasti.

Zloženie

Čistená voda, hydroxyetylcelulóza, hyaluronát sodný, propylénglykol, xantánová guma, guarová guma, chlorid sodný, kyselina mliečna, laktát sodný, fenoxietanol, etylhexylglycerín. Bez parfumiácie.

Spôsob použitia

Pred aplikáciou si dôkladne umyte ruky. Aplikujte končekmi prstov do perineálnej oblasti, vulvy a prednej časti vagíny a kruhovými pohybmi jemne masírujte bez oplachovania. Po použití uzavrite. Môže sa aplikovať ráno, večer alebo podľa potreby, najmä tesne pred pohlavným stykom. V prípade bolestivého pohlavného styku sa odporúča počiatočná aplikácia obom partnerom.

Skladovanie

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. Skladujte na suchom a chladnom mieste, chránené pred svetlom a mimo dosahu zdrojov tepla. Dátum expirácie sa vzťahuje na prípravok riadne skladovaný v neporušenom obale. Po otvorení spotrebujte prípravok do 9 mesiacov.

Upozornenie

Nepoužívajte v prípade precitlivlosti na zložky prípravku. V prípade nežiaducich reakcií prerušte liečbu a poraďte sa s lekárom. Použitie počas tehotenstva a dojčenia vopred konzultujte s lekárom. Neobsahuje spermicidne pôsobiace látky a nemá antikoncepčný účinok. Prípravok nepoužívajte počas menštruácie. Bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom prípravok nepoužívajte súčasne s inou lokálnou gynekologickou liečbou. Používanie prípravku nie je indikované pred nástupom prvej menštruácie (menarche). Nepoužívajte prípravok v prípade výskytu lézií vaginálnej sliznice. Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale. Nepoužívajte, ak je obal otvorený alebo poškodený.

ZDRAVOTNÍČKA POMÔČKA

50 ml

Dátum poslednej revízie: marec 2022

 Biofarma, Via Castelliere 2,
Mereto di Tomba (UD) – Itálie/Taliansko

Distributor/Distribútor:
Dr. Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, Česká republika

 0373



VER0124

