

Dr. Max Oční sprej je sterilní solný roztok s fyziologickým pH k očním a periokulárním použitím.

Dr. Max Oční sprej prokazatelně napomáhá odstraňování periokulárních a očních sekretů u novorozenců, od prvních dnů života, kojenců a dětí (od narození do 6 let). Přípravek mohou používat také děti starší 6 let, mladiství, dospělí a starší lidé, a to i v případě, že mají nasazené kontaktní čočky.

Dr. Max Oční sprej působí podáním očního roztoku a následným změkčením a odplavením sekretů, které se nachází na povrchu oka, ve spojivkové klenbě a na okrajích víčka.

Dr. Max Oční sprej má ředící, dekongescenční a hydratační účinek a zvyšuje objem slzného filmu.

Dr. Max Oční sprej obsahuje vodné destiláty (hydroláty) z trápatkovky bleďé a ze světlíku lékařského, které díky svým hydratačním účinkům přispívají ke zvlhčujícímu působení přípravku.

Dr. Max Oční sprej je kompatibilní s měkkými kontaktními čočkami.

URČENÝ ÚČEL

Dr. Max Oční sprej je určen k odstranění periokulárních a očních sekretů u novorozenců, od prvních dnů života, kojenců a dětí (od narození do 6 let). Přípravek mohou používat také děti starší 6 let, mladiství, dospělí a starší osoby (tj. osoby starší 65 let).

Dr. Max Oční sprej je také určen ke zklidnění drobných očních potíží.

INDIKACE

Dr. Max Oční sprej je indikován:

- Ke každodennímu čištění očních víček a očí novorozenců, kojenců a dětí a k čištění očí při novorozenecké konjunktivitě.
- Pro snázi odstranění očních sekretů nebo zbytků nečistot způsobených zahuštěním hlenu nebo faktory životního prostředí, jako jsou prach, pyl, alergie nebo soli.
- Pro snázi odstranění očních a periokulárních sekretů vznikajících v důsledku zánětu očí nebo očních víček (blefaritidy).
- K odstranění hnisavých sekretů a k ředění slzného filmu v případě stenózy slzných kanálků (časté u novorozenců).
- Ke kontrole mikrobiologické zátěže obvázaného oka v případě amblyopie, díky zvýšení objemu slz a následnému zředění mikroorganismů. Během léčby se přípravek podává v intervalu mezi dvěma převazy a ke zvlhčení oka při nošení kontaktních čoček.
- Dr. Max Oční sprej** je také indikován pro:
 - Zmírnění nepříjemných pocitů v očích a zarudnutí spojivek způsobené klimatickými podmínkami, jako je vítr, nadměrné teplo nebo nadměrné vystavení slunečnímu záření.
 - Zmírnění očních potíží způsobených sezónními alergiemi a různými formami alergické konjunktivitidy.
 - Zmírnění pocitu pálení, nepohodlí nebo svědění očí v případě suchého oka způsobeného faktory životního prostředí.
 - Snížení pocitu suchého oka/cizího tělesa po farmakologické léčbě.

Dr. Max Oční sprej lze používat i několikrát denně.

SLOŽENÍ

Chlorid sodný (0,82 %), vitamin E TPGS, hydrolát z trápatkovky bleďé (*Echinacea pallida*), hydrolát ze světlíku lékařského (*Euphrasia officinalis*), heptahydrát síranu zinečnatého, monohydrát kyseliny citronové, tribazický dihydrát citrónanu sodného, voda na injekci (WFI).

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Před použitím si pečlivě umyjte a osušte ruce.
- Uchopte lahvičku tak, aby prst, který používáte ke stlačení rozprašovače (ukazováček nebo palec), byl správně umístěn na rozprašovači a nezakrýval rozprašovací otvor.
- Držte lahvičku svisle a silně stlačte rozprašovač, aby se roztok rozprášil.
- V případě přímé aplikace do oka stříkejte ze vzdálenosti asi 10 cm od oka.
- Před první aplikací přípravku několikrát stlačte rozprašovač, dokud nejde k pravidelnému rozstříku přípravku.
- V případě skladování při teplotách pod 15 °C a při použití u dětí, držte lahvičku před použitím chvíli v ruce, aby se zahřála a dítě nebylo vystaveno nepříjemnému pocitu chladu.

• Přípravek používejte následujícím způsobem:

- *Pro vyláčení očí namísto běžných navlhčících či namočených ubrousků:* aplikujte 1 nebo 2 vstřiky roztoku na sterilní gázu a použijte ji k okamžitému a jemnému očištění oblasti okolo očí, čímž odstraníte veškeré sekrety. Vyvarujte se silnému tření. Zaschlé sekrety změkčíte namočenou gázou, dokud je nebudete schopni odstranit. Na každé oko použijte jinou gázu.
- *Pro vyláčení očí:* aplikujte 1 nebo 2 vstřiky přípravku do každého oka, otevřeného či zavřeného:
 - a. aplikace do otevřeného oka, kdy mrkání způsobené zvlhčením objemu slzné tekutiny umožňuje přípravku omýt povrch oka a společně s přebytkem tekutiny odstranit cizí částice;
 - b. aplikace do zavřeného oka, kdy se tekutina, která zůstane zachycená v okrajích víčka, díky mrkání dostane do styku s povrchem oka, čímž zvýší objem slzné tekutiny a přípravek tak společně s přebytkem tekutiny z povrchu oka smyje cizí částice.
- *Ke zmírnění nepříjemných pocitů nebo zarudnutí:* aplikujte 1 nebo 2 vstřiky přípravku do každého oka.
- Po prvním otevření lze obsah lahvičky používat opakovaně po dobu 3 měsíců.

UPOZORNĚNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Přípravek je určen pouze pro oftalmologické nebo periokulární použití.
- Určeno k použití jednou osobou.
- Nepoužívejte přípravek, pokud je lahvička poškozená nebo není při prvním otevření dokonale uzavřená.
- Během používání se nedotýkejte rozprašovacím otvorem očí ani jiných povrchů.
- Nepoužívejte přípravek po uplynutí data použitelnosti uvedeného na obalu.
- V případě výskytu nežádoucích účinků během užívání přerušete léčbu a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte přípravek v případě nesnášenlivosti kterékoli jeho složky a/nebo rostlin z čeledi hvězdnicovitých (*Asteraceae*) a/nebo zářezovitých (*Orabanchaceae*).
- Nejsou hlášeny žádné interakce s léky nebo jinými očními kapkami, mezi aplikacemi jakýchkoli jiných očních kapek však ponechte interval alespoň 15 minut.
- Přípravek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým lékařem.
- Pouze pro vnější použití, nepolykejte.
- Nemanipulujte s lahvičkou a jejími mechanismy, ani je nepoškozujte.
- **Dr. Max Oční sprej** nenahrazuje žádnou lékovou terapii předepsanou vaším lékařem.
- Případnou závažnou nežádoucí příhodu nahláste výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém se nacházíte.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Dosud nejsou známy žádné nežádoucí vedlejší účinky.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Uchovávejte přípravek v suchu při teplotě od 2 °C do 30 °C a chraňte jej před přímým teplem a slunečním zářením.

Po prvním otevření lze obsah používat opakovaně po dobu 3 měsíců.

BALENÍ

Jedna lahvička o objemu 10 ml s rozprašovačem obsahující sterilní roztok bez konzervačních látek.

DATUM POUŽITELNOSTI

U neotevřeného balení nepřekračujte datum použitelnosti uvedené na obalu.

Datum poslední revize: 02.01 z 10/2022

Dr. Max Očný sprej je sterilný solný roztok s fyziologickým pH na očné a periokulárne použitie.

Dr. Max Očný sprej preukázateľne pomáha odstraňovať periokulárne a očné sekréty u novorodencov, od prvých dní života, u dojčiat a detí (od narodenia do 6 rokov). Prípravok môžu používať aj deti staršie ako 6 rokov, mladiství, dospelí a starší ľudia, a to aj v prípade, že majú nasadené kontaktné šošovky.

Dr. Max Očný sprej pôsobí podaním očného roztoku a následným zmäkčením a odplavením sekretov, ktoré sa nachádzajú na povrchu oka, v spojivkovej klenbe a na okrajoch viečka.

Dr. Max Očný sprej má riediaci, dekontaminujúci a hydratačný účinok a zvyšuje objem slzného filmu.

Dr. Max Očný sprej obsahuje vodné destiláty (hydroláty) z echinacey bledej a z očianky lekárskej, ktoré vďaka svojim hydratačným účinkom prispievajú ku zvlhčujúcemu pôsobeniu prípravku.

Dr. Max Očný sprej je kompatibilný s mäkkými kontaktnými šošovkami.

ÚČEL URČENIA

- Dr. Max Očný sprej** je určený na odstránenie periokulárnych a očných sekretov u novorodencov, od prvých dní života, u dojčiat a detí (od narodenia do 6 rokov). Prípravok môžu používať aj deti staršie ako 6 rokov, mladiství, dospelí a staršie osoby (t. j. osoby staršie ako 65 rokov).
- Dr. Max Očný sprej** je určený aj na upokojenie drobných očných ťažkostí.

INDIKÁCIE

Dr. Max Očný sprej je indikovaný:

- Na každodenné čistenie očných viečok a očí novorodencov, dojčiat a detí a na čistenie očí pri novorodeneckej konjunktivitíde.
- Na jednoduché odstránenie očných sekretov alebo zvyškov nečistôt spôsobených zahustením hlienu alebo faktormi životného prostredia, ako sú prach, peľ, alergény alebo soli.
- Na ľahšie odstránenie očných a periokulárnych sekretov vznikajúcich v dôsledku zápalu očí alebo očných viečok (blefaritidy).
- Na odstránenie hnisavých sekretov a riedenie slzného filmu v prípade stenózy slzných kanálikov (časté u novorodencov).
- Na kontrolu mikrobiologickej záťaže obviazaného oka v prípade amblyopie vďaka zvýšeniu objemu slzy a následnému zriedeniu mikroorganizmov. Počas liečby sa prípravok instiluje v intervale medzi dvomi previazmi a na zvlhčenie oka pri nosení kontaktných šošoviek.

Dr. Max Očný sprej je indikovaný aj na:

- Zmiernenie nepriemerných pocitov v očiach a začervenania spojiviek spôsobeného klimatickými podmienkami, ako je vietor, nadmerné teplo alebo nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu.
- Zmiernenie očných ťažkostí spôsobených sezónnymi alergiami a rôznymi formami alergickej konjunktivitídy.
- Zmiernenie pocitu pálenia, nepohodlia alebo svrbenia očí v dôsledku suchého oka spôsobeného faktormi životného prostredia.
- Na zmiernenie pocitu suchého oka/pocitu cudzieho telesa po farmakologickej liečbe.

Dr. Max Očný sprej možno používať aj niekoľkokrát denne.

ZLOŽENIE

Chlorid sodný (0,82 %), vitamín E TPGS, hydrolát z echinacey bledej (*Echinacea pallida*), hydrolát z očianky lekárskej (*Euphrasia officinalis*), heptahydrod síranu zinocitratného, monohydrát kyseliny citrónovej, tribázičky dihydrát citrát sodného, voda na injekcie (WFI).

SPÔSOB POUŽITIA

- Pred použitím si dôkladne umyte a osušte ruky.
- Uchopte fľaštičku tak, aby bol prst, ktorý používate na stlačenie rozprašovača (ukazovák alebo palec), správne umiestnený na rozprašovači a nezakrýval rozprašovací otvor.
- Držte fľaštičku zvislo a silno stlačte rozprašovač, aby ste rozprášili roztok.
- V prípade priamej aplikácie do oka striekajte zo vzdialenosti asi 10 cm od oka.
- Pred prvou aplikáciou prípravku niekoľkokrát stlačte rozprašovač, kým nedocielite pravidelný rozstrek prípravku.

V prípade skladovania pri teplotách pod 15 °C a pri použití u detí podržte fľaštičku pred použitím chvíľu v ruke, aby sa zahrialo a dieťa nebolo vystavené nepriemernému pocitu chladu.

Prípravok používajte nasledujúcim spôsobom:

- Na výplach očí namiesto bežných navlhčených či namočených obrúsok:** aplikujte 1 alebo 2 vstreky roztoku na sterilnú gázu a použite ju na okamžité a jemné očistenie oblasti okolo očí, čím odstránite všetky sekréty. Vyvarujte sa silnému treniu. Zasuchnuté sekréty zmäknújte namočenou gázou, kým sa nebudú dať odstrániť. Na každé oko použite inú gázu.
- Na výplach očí:** aplikujte 1 alebo 2 vstreky prípravku do každého oka, otvoreného alebo zatvoreného:
 - aplikácia do otvoreného oka, keď vďaka žmurkaniu spôsobenému zväčšením objemu slznej tekutiny umožní prípravku omýť povrch oka a spolu s prebytkom tekutiny odstrániť cudzie častice;
 - aplikácia do zatvoreného oka, keď sa tekutina, ktorá zostane zachytená v okrají viečka, dostane žmurkáním do styku s povrchom oka, čím zväčší objem slznej tekutiny a prípravok tak zmýje spolu s prebytkom tekutiny z povrchu oka cudzie častice.
- Na zmiernenie nepriemerných pocitov alebo začervenania:** aplikujte 1 alebo 2 vstreky prípravku do každého oka.
- Po prvom otvorení je možné obsah fľaštičky používať opakovane po dobu 3 mesiacov.

UPOZORNENIA A PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Prípravok je určený len na oftalmologické alebo periokulárne použitie.
- Určené na použitie jednou osobou.
- Nepoužívajte prípravok, ak je fľaštička poškodená alebo ak nie je pred prvým otvorením dokonale uzavretá.
- Počas používania sa nedotýkajte rozprašovacím otvorom očí ani iných povrchov.
- Nepoužívajte prípravok po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.
- V prípade výskytu nežiaducich účinkov počas používania prerušte liečbu a poraďte sa s lekárom.
- Nepoužívajte prípravok v prípade známej neznášanlivosti na niektorú zo zložiek roztoku a/alebo rastlín z čeľade astrovité (*Asteraceae*) a/alebo zárazovité (*Orobanchaceae*).
- Nie sú hlásené žiadne interakcie s liekmi alebo inými očnými kvapkami; avšak medzi aplikáciami akýchkoľvek iných očných kvapiek ponechajte interval aspoň 15 minút.
- Prípravok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa nakladania s odpadmi.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím tohto produktu sa poraďte so svojim lekárom.
- Len na vonkajšie použitie, neprehŕtajte.
- Nemanipulujte s fľaštičkou a jej mechanizmami, ani ich nepoškodzuje.
- Dr. Max Očný sprej** nenahrádza žiadnu liekovú terapiu predpísanú vašim lekárom.
- Prípadnú závažnú nehodu nahláste výrobcovi a príslušnému úradu členského štátu, v ktorom sa nachádzate.

NEŽIADUCE ÚČINY

Doteraz nie sú známe žiadne nežiaduce vedľajšie účinky.

SKLADOVANIE PODMIENKY

Výrobok uchovávať v suchu pri teplote od 2 °C do 30 °C a mimo dosahu priameho tepla a slnečného žiarenia.

Po prvom otvorení je možné obsah používať opakovane po dobu 3 mesiacov.

BALENIE

Jedna fľaštička s objemom 10 ml s rozprašovačom obsahujúca sterilný roztok bez konzervačných látok.

ČAS POUŽITELNOSTI

Pri neotvorenom balení neprekračujte dátum expirácie uvedený na obale.

Dátum poslednej revízie: 02.01 z 10/2022



Dr. Max DBC, Florentinum (D),
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

COLORS

SPECIALS

PRODUCT NAME:

Oční sprej

Black

BAR CODE:

8595566420895

DIMENSION (rozměr):

130 x 180 mm

DATE:

13. 10. 2023

ARTWORK SUPPLIER: GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz