

VITAMMY®

UFO

ELEKTRONICKÝ HREBEŇ NA VŠI A HNIDY

Model LC10

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si prečítajte pokyny.

OBSAH

Úvod	3
Vysvetlenie použitých znakov	4
Upozornenia pred použitím	6
Upozornenia o batérii	6
Princíp elektronického hrebeňa	10
Popis zariadenia	11
Funkcie trojpolohového spínača	12
Návod na použitie	13
Riešenie problémov	16
Výmena batérií	17
Čistenie a uskladnenie	18
Likvidácia zariadení podľa smerníc EU	19
Smernice EMC - Elektromagnetická kompatibilita	20
Záruka	28
Kontaktné informácie	32

ÚVOD

Pokyny a údržba používateľa sa musia prísne dodržiavať, aby sa zabezpečila správna prevádzka a predĺžila sa životnosť prístroja.

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho, aby ste sa vyhli nebezpečenstvám spôsobeným nesprávnym používaním.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie

VYSVETLENIA POUŽITÝCH SYMBOLOV

Výstražné značky a symboly, ktoré sa môžu objaviť v pokynoch a na kryte prístroja, sú dôležité na zabezpečenie bezpečného používania zakúpeného zariadenia. Ich význam je vysvetlený v nasledujúcej tabuľke:

	Prečítaj návod
	Pozor!
	Zariadenie typu BF
	Autorizovaný predajca v EU
	výrobca



Nepotrebné zariadenia sa musia likvidovať v súlade s platnými predpismi. Zariadenie nemožno likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom. Zariadenie by sa malo zlikvidovať do špeciálneho kontajnera na použité elektronické a elektrické zariadenia alebo ho vrátiť do obchodu, kde si kupujete podobné zariadenia. Za správnu likvidáciu zariadenia zodpovedá používateľ.

Správne zlikvidované zariadenie možno recyklovať, čo zabraňuje negatívnemu vplyvu na životné prostredie a zdravie.



Chráňte pred vlhkosťou



0197

Označenie zdravotníckou značkou CE podľa smernice 93/42 / CC a následných zmien a doplnení

UPOZORNENIA PRED POUŽITÍM

Naším mottom je neustále zlepšovať naše produkty, čo je dôvod, prečo existujú malé rozdiely medzi produktami v škatuli a jeho fotografiami.

- ⚠ Pred použitím si starostlivo prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.

UPOZORNENIA K BATÉRIÁM

- ⚠ Batérie musia byť mimo dosahu detí, pretože požitie môže viesť k otravám a / alebo iným vážnym zdravotným a životným rizikám.
- ⚠ Baterie ihneď odstráňte a udržiavajte ich mimo dosahu detí a priameho zdroja tepla.
- ⚠ Batérie môžu obsahovať toxické látky

ohrozujúce zdravie a životné prostredie. Batérie vždy nabíjajte v súlade s platnými predpismi. Batériu nikdy nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

- ⚠ Vymeňte batérie za nové, kompatibilné s typom použitým v tejto príručke (AAA).
- ⚠ Nepoužívajte dobíjateľné batérie, pretože môžu mať nižšiu kvalitu a nemajú dostatočne veľkú životnosť. Použitie batérie môže znížiť výkon zariadenia.
- ⚠ Ak sa zariadenie nepoužije po dlhú dobu, vytiahnite batériu - nevytiahnutie batérie môže poškodiť zariadenie.
- ⚠ Ak zistíte, že batéria vytiekla, použite ochranné rukavice, vyberte batériu a vyčistite zariadenie suchou handričkou.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

- ⚠ Vitammy UFO by ste mali používať iba na boj proti všiam na hlave. Kvôli rozdielom medzi hlavou, telom a intímnymi časťami by ste nemali používať UFO mimo vlasy a pokožky na hlave.
- ⚠ Tento hrebeň nepoužívajte na zvieratách - neprenášajú ľudské vši.
- ⚠ Nedotýkajte sa kovových zubov na hrebeni UFO s prstami, ak je zariadenie zapnuté.
- ⚠ Vitammy UFO nie je vodotesné - neponárajte ho do žiadnej kvapaliny.
- ⚠ Nikdy nevkladajte zariadenie do úst alebo iných častí tela.
- ⚠ Vitammy UFO hrebeň sa nesmie používať u pacientov s epilepsiou alebo srdcovým ochorením.
- ⚠ Vitammy UFO môže prerušiť funkčnosť elektronických zdravotných pomôcok.

- ⚠ Niektorí citliví ľudia môžu pri používaní zariadenia pocítiť slabé chvenie - nie je riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ⚠ Vitammy UFO by sa malo používať u detí iba pod dozorom dospeléj osoby.
- ⚠ Chráňte zariadenie pred pádom a silnými nárazmi.
- ⚠ Vitammy UFO nefunguje na veľmi mastných vlasoch.
- ⚠ Nevystavujte zariadenie priamym atmosférickým podmienkam (dážď, slnko atď.).
- ⚠ Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
- ⚠ Prístroj alebo jeho komponenty nesmie používateľ opravovať. Ak je zariadenie poškodené a nefunguje správne, vypnite ho a obráťte sa na službu.
- ⚠ Poznámka: Neupravujte zariadenie

bez súhlasu výrobcu!


- ⚠ Výrobca, predajca a distribútor sú zodpovední za bezpečnosť a správnu funkciu zariadenia, iba ak: a) sa používa v súlade s pokynmi; b) parametre elektrickej inštalácie v mieste použitia zodpovedajú platným predpisom.
- ⚠ Nepoužívajte prístroj, keď pacient spí.

PRINCÍP ELEKTRONICKÉHO HREBEŇA

Pri aplikácii zariadenia na suché vlasy odosiela hrebeň malý elektrický náboj do jeho kovových zubov. Keď sa hrebeň dostane do kontaktu s všami, elektrický náboj všetky zabije. Indikátor poplachu Orange Louse Detection sa rozsvieti, keď je všetko detekované, usmrtené a chytené v zuboch hrebeňa. Odstráňte všetky usmrtené vši (lampa zhasne) a pokračujte v česaní vlasov. Vitammy UFO zabije dospelé vši. Pomáha tiež odstrániť hnidy, ale nezabije vajcia, z ktorých niektoré môžu zostať na vlasoch.


Odporúča sa zariadenie používať každé 2 až 3 dni počas
16 dní

POPIS ZARIADENIA

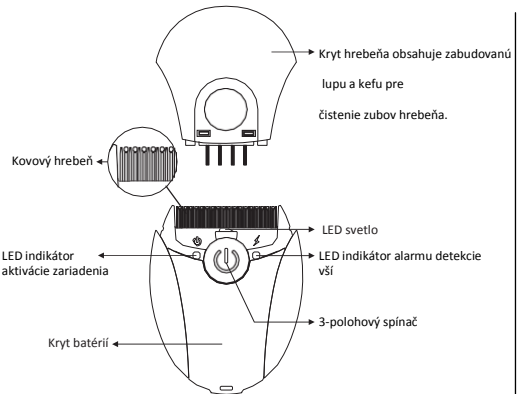


FUNKCIE 3 POLOHOVÉHO SPÍNAČA

1. Posunutie prepínača maximálne smerom k zadnej časti prístroja - zariadenie je vypnuté, kontrolka je vypnutá.

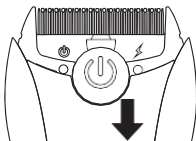


2. Prepnite prepínač do strednej polohy – na prístroji zasvieti Oranžový LED alarm

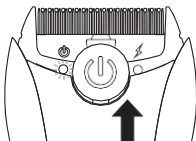

LED kontrolka detekcie vší zasvieti na jednu sekundu, čo znamená kontrolu úrovne batérie. Ak napájanie z batérie postačuje, zhasne alarm a rozsvieti sa zelená kontrolka. Prístroj bude pripravený na prevádzku.

3. Posunutie prepínača smerom k hrebeňu v maximálnom smere - aktivuje LED svetlo, ktoré pomáha pri hľadaní vši.

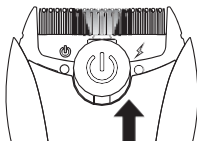

NÁVOD NA POUŽITIE



PRED POUŽITÍM

- ⚠ Pred použitím hrebeňa Vitommy UFO musia byť vlasy suché.
- ⚠ Hrebeň nepoužívajte v kombinácii so šampónom alebo inými druhmi látok na likvidáciu vši.
- ⚠ Najlepšie výsledky sa dosiahnú ak budú vlasy čisté a nebudú pokryté žiadnou kozmetickým prípravkom, ako je gél alebo vlasová pena.
- ⚠ Pred použitím hrebeňa Vitammy UFO


rozčesťte vlasy normálnym hrebeňom alebo kefou, aby vlasy neboli zamotané – uľahčí to prevádzku hrebeňa UFO. Zuby hrebeňa UFO sú zámerné umiestnené blízko seba a môžu ľahko zablokovat' nechránené vlasy.

SPOSOB POUŽITIA

1. Odstráňte kryt hrebeňa a posuňte prepínač do strednej polohy - zariadenie skontroluje úroveň nabitia batérie a potom sa rozsvieti zelená LED dióda.

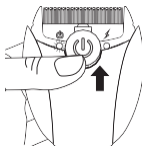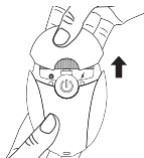

2. Posuňte prepínač ďalej dopredu a aktivujte LED svetlo.

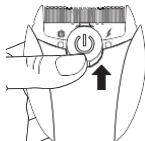

3. Hrebeň udržiujte pod uhlom 45 ° a zuby hrebeňa vlasov v blízkosti ich základne. LED svetlo pomáha vidieť vši na miestach, kde nie je dostatok svetla alebo ak sú tmavé vlasy.



4. Keď prístroj zabije všetky vši, rozsvieti sa kontrolka detekcie usmrtených vší.
5. Odstráňte všetky mŕtve vši kefkou vloženou do krytu (lampa zhasne) a pokračujte v česaní vlasov.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Oranžová kontrolka nezhasne	Hrebeň je znečistený	Očisti hrebeň
Oranžová kontrolka bliká	Slabá batéria	Vymeň batériu
Voš je chytená, ale oranžová kontrolka nesvieti	Voš, alebo špina na hrebeni	Vyčisti hrebeň
	Voš je malá, alebo sa nedotýka hrebeňa	Voš je mŕtva, pokračujte v zákroku


Ak po overení uvedených podmienok zariadenie stále nefunguje alebo nefunguje správne, kontaktujte servis VITAMMY, distribútora alebo predajcu.

VÝMENA BATÉRIÍ

Vitammy UFO je napájané jednou batériou AAA.

Ak ju chcete vymeniť, odsuňte kryt batérie a potom vyberte batériu. Vložte novú batériu podľa polarítu zobrazenú vo vnútri priestoru pre batérie. Namontujte kryt batérie.



Vyberte batériu zo zariadenia, ak sa toto nepoužíva dlhší čas – zabránite vytečeniu batérie a možnému poškodeniu prístroja.

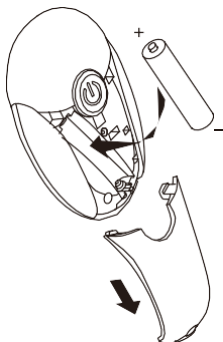

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Kovové zuby zariadenia môžete čistiť štetkou zabudovanou do krytu hrebeňa.

V prípade ťažších nečistôt môžete použiť hygienický tampón namočený v alkohole.

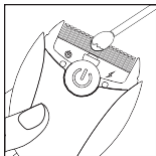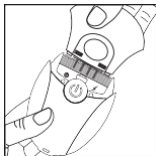

S prístrojom pri čistení manipulujte opatrne – inak ho môžete poškodiť.

Uložte zariadenie na bezpečné miesto, keď sa nepoužíva. Chráňte prístroj pred vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘ- TU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMO- WYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



V súlade s požiadavkami smernice 2012/19 / ES

symbol umiestnený na zariadení znamená, že zariadenie určené na likvidáciu je považované za odpad a malo by byť predmetom "separovaného zberu odpadu".

Preto by mal užívateľ odovzdať odpad do príslušného miesta separovaného zberu odpadov určeného miestnymi orgánmi alebo ho poskytnúť predajcovi pri nákupe nového ekvivalentného zariadenia. Selektívny zber odpadu a následné spracovanie, zhodnotenie a zneškodňovanie podporujú výrobu zariadení využívajúcich recyklované materiály a znižujú negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie spôsobený možným nesprávnym nakladaním s odpadmi.

Toto zariadenie spĺňa aktuálne požiadavky elektromagnetickej kompatibility. Elektrické zariadenia v medicínskych aplikáciách vyžadujú pri montáži a používaní mimoriadnu starostlivosť v súlade s požiadavkami EMC. Preto sa vyžaduje, aby bolo zariadenie inštalované a používané v súlade so špecifikáciami poskytnutými výrobcom. Existuje riziko elektromagnetického rušenia s inými zariadeniami, najmä so zariadeniami na analýzu a spracovanie. Aj v prípade FM rádia alebo rádiovkej komunikácie (mobilné telefóny, bezdrôtové siete) môže dôjsť k elektromagnetickému rušeniu. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať technické a funkčné zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

⚠ Poznámka: Toto zariadenie bolo dôkladne otestované, aby sa zabezpečila jeho správna funkcia.

⚠ Poznámka: Toto zariadenie počas prevádzky nesmie byť umiestnené vedľa iných zariadení alebo uložené na iných zariadeniach. V prípade potreby overte správnu funkciu prístroja.

Výrobok je certifikovaný CE



USMERNENIA A VYHLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROMAGNETICKÁ IMUNITA

Model LC10 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí v súlade s nasledujúcimi špecifikáciami. Zákazník alebo používateľ LC10 by mal zabezpečiť, aby sa model používal v tomto prostredí.

Test odolnosti	Test úrovne IEC 60601	Úroveň zhody	elektromagnetické prostredie
Elektrostatické výboje podľa IEC 61000-4-2	± 6 kV kontakt ± 8 kV vzduchu	± 6 kV kontakt ± 8 kV vzduchu	Podlahy môžu byť drevo, betón alebo keramická dlažba. Ak je na podlahe syntetický materiál, relatívna vlhkosť v miestnosti by mala byť najmenej 30%.

WSKAZÓWKI I DEKLARACJA PRODUCENTA DOT. ODPORNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Skoki napięcia IEC 61000-4-4	±2kV dla linii zasilających ±1kV dla powietrza	Nie dotyczy	Zasilanie typowe dla szpitali lub otoczenia komercyjnego.
Przebiecia IEC 61000-4-5	±1kV linia/linie i neutralny ±2kV tryb wspólny	Nie dotyczy	Zasilanie typowe dla szpitali lub otoczenia komercyjnego.

USMERNENIA A VYHLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROMAGNETICKÝCH EMISIÍ

Napáťové špičky IEC 61000-4-11	<5% UT <5% Ut (> 95% zapadu Ut dla0,5cyklu) 40% Ut (60% závislosť od dla5cycl) 30% Ut (cyklus 70% zapadu dla25) <5% Ut (> 95% uvoľňovací cyklus)	Neuvádza	Výkon typický pre nemocnice alebo komerčné prostredie
Magnetické pole napájania s frekvenciou (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Výkon typický pre nemocnice alebo komerčné prostredie

Poznámka: UT je sieťové napätie pred aplikáciou testovacej úrovne.

USMERNENIA A VYHLÁSENIE VÝROBCU ELEKTROMAGNETICKÝCH EMISIÍ

Model LC10 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí v súlade s nasledujúcimi špecifikáciami. Zákazník alebo používateľ LC10 by mal zabezpečiť, aby sa model používal v tomto prostredí.

Test odolnosti	kompatibilita	Elektromagnetické prostredie
RF emisia CISPR 11	Skupina 1	Model LC10 využíva energiu RF iba pre interné funkcie. Preto sú RF emisie veľmi nízke a nemali by zasahovať do práce v blízkosti elektrických zariadení.
Emisia RF CISPR 11	Trieda B	Model LC10 je vhodný pre domáce použitie v domácnostiach a budovách s priamym napojením na nízkonapäťovú sieť.
Harmonické emisie IEC 61000-3-2	Neuplatňuje sa	
Kolísanie napätia IEC 61000-3-3	Neuplatňuje sa	

USMERNENIA A VYHLÁSENIE VÝROBCU - ELEKTROMAGNETICKÁ IMUNITA

Model LC10 je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí v súlade s nasledujúcimi špecifikáciami. Zákazník alebo používateľ LC10 by mal zabezpečiť, aby sa model používal v tomto prostredí.

Emisný test	Test úrovne IEC 60601	Úroveň zhody	elektromagnetické prostredie
-------------	-----------------------	--------------	------------------------------

Poznámka 1: Pri frekvencii 80 MHz a 800 MHz sa uplatňuje vyšší frekvenčný rozsah. Poznámka 2: Tieto pokyny sa nemusia vzťahovať na každú situáciu. Rozširovanie elektromagnetických vln je ovplyvnené absorpciou a odrazmi rôznych štruktúr, objektov a ľudí. Intenzita poľa z pevných vysielačov v okolí, ako je napríklad vysielačov základňových telefónov využívajúce bezdrôtové (mobilné) telefóny, rádiá, prenosné amatérske rádiové vysielače, AM vysielača, FM a televízie, nemožno s presnosťou teoreticky predpovedať. Aby sa vyhodnotilo elektromagnetické prostredie generované rádiovými vysielačmi, mali by sa zvážiť merania elektromagnetického poľa. Ak je intenzita poľa meraná v poli v blízkosti prístroja prekračuje prípustnú úroveň dodržiavania rádiových frekvencií, je potrebné vykonať pozorovanie, či zariadenie funguje správne. Ak zistíte nejakú poruchu, môžu byť potrebné ďalšie nápravné opatrenia, ako je napríklad otočenie zariadenia v inom smere alebo sa presuniete na iné miesto. Pre frekvenčný rozsah od 150 kHz do 80 MHz by intenzita poľa mala byť nižšia ako V1 V / m.

Vysielaný rádiofrekvenčný signál IEC 61000-4-3	3 Vrms 80MHz do 800MHz 80 MHz do 2,5 GHz	3 Vrms 3 V/m	Prenosné a mobilné rádiokomunikačné zariadenia by sa mali používať vo vzdialenosti od všetkých komponentov zariadenia vrátane káblov, ktoré nie sú menšie ako odporúčaná vzdialenosť, vypočítané z rovnice frekvencie vysielateľa. Odporúčaná vzdialenosť: $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz až 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz až 2,5 GHz kde P je maximálny príkon vysielateľa (W) podľa údajov výrobcu a d je odporúčaná vzdialenosť v metroch (m). Pevnosť poľa z pevných RF vysielateľov, určená meraniami elektromagnetického poľa na poli, by mala byť nižšia ako úroveň zhody pre každý rozsah frekvencie b. Rušenie môže nastať v blízkosti zariadení označených nasledujúcim symbolom: 

ZÁRUKA

ZARIADENIE: VITAMMY UFO LC10

Subjekt poskytujúci záruku

Mlongauer, s.r.o., Hlavná 43, 953, Babindol

Infolinka pomoci a technickej podpory

tel. +421904404831

e-mail:mlongauer@mlongauer.sk

ZÁRUKA

Ručiteľ ubezpečuje kupujúceho, že zariadenie VITAMMY, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, bolo navrhnuté a vyrobené na základe vysokých štandardov kvality a kvalitného vybavenia, bez materiálových alebo výrobných chýb, ktoré by mohli narušiť jeho správnu prevádzku. V prípade väd, škôd a chýb odhalených počas záručnej lehoty Ručiteľ bezplatne opraví alebo vymení zariadenie za nové, čo najskôr, nepresahujúce 30 dní.

Typ záruky

Táto záruka predpokladá, že reklamovaný produkt bude doručený do servisu na náklady kupujúceho, opravené bezodplatne a doručené bezplatne kupujúcemu.

Doba záruky

24 mesiacov na zariadenie. Žiadna záruka na časti a príslušenstvo, ktoré sú vystavené opotrebovaniu počas bežného používania

Priebeh záruky

Záruka platí od dátumu zakúpenia, ktorý je potvrdený dokladom o kúpe, ktorý musí byť pripojený k záručnému listu.

Miesto záruky

Záruka je platná na území SR.

Postup v prípade poruchy

Ak chcete využiť záruku, do 14 dní od odhalenia chyby sa obráťte na infolinku pomoci a technickej podpory a požiadajte o pomoc a v prípade potreby začnite reklamáciu. V rámci reklamácie by malo byť chybné zariadenie odoslané na adresu servisu, priložené k tejto záručnej karte spolu s dokladom o kúpe.

Podmienky platnosti záruky

V záujme zachovania záruky doložte spolu s chybným zariadením, tento záručný list (správne vyplnený a podpísaný) a doklad o zakúpení s uvedením dátumu predaja, spolu s názvom obchodu.

Obmedzenia a vylúčenie záruky

Záruka neposkytuje žiadnu kompenzáciu za nepriamu alebo priamu škodu spôsobenú osobám alebo zariadeniam, keď prístroj nefungoval alebo bol v servisnom stredisku. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, ako aj na chyby a škody spôsobené:

- nevhodné používanie (nie podľa určeného použitia) alebo spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie
- nevhodné používanie alebo nezlučiteľné s pokynmi na uskladnenie a údržbu (napr. Používanie nevhodných čistiacich prostriedkov)

a používanie nevhodných spotrebných materiálov

- náhodné opravy anepovolené zmeny prísroja
- vonkajšie príčiny (atmosférické javy, prepätia v elektrickej sieti, nesprávne nabíjanie atď.)

Záruka sa nevzťahuje na poruchu produktu z dôvodu zmien vlastností (poškodenia) komponentov, ktoré sú vystavené prirodzenému opotrebovaniu.

Záručné opravy nie sú činnosti súvisiace s údržbou a čistením zariadenia opísané v užívateľskej príručke

Pečiatka a podpis predajcu

Dátum

Podpis kupujúceho

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

VÝROBCA:



AVITA CORPORATION

9F, No.78, Sec.1, Kwang-Fu Rd., San-Chung District,
24158 New Taipei City, Taiwan

MADE IN CHINA/VYROBENÉ V ČÍNE

DISTRIBÚTOR PRE SR, ČR a Maďarsko
Mlongauer, s.r.o.

Hlavná 43, 951 53 Babindol

Infolinka pomoci a technickej podpory:

+421940404831

www.babys.sk

mlongauer@mlongauer.sk

VITAMMY.PL