



Woman secret

Jednokrakový HCG tehotenský test - kazeta

Určené na samodiagnostiku

"Baby"

Vybrali ste si vysokokvalitný tehotenský test, ktorý zisťuje prítomnosť HCG hormónu v moči pre skoré zisťovanie gravidity. Vysoká citlivosť testu a jeho presnosť Vám pri správnom použití testu umožní zistiť Vaše tehotenstvo už 5 - 7 dní po počatí. Manipulácia s testom je jednoduchá a rýchla. Test je možné použiť v priebehu celého dňa. Jednokrakový tehotenský HCG test je určený pre domáce použitie.

Testovacia súprava obsahuje:

1. Testovacia kazeta
2. Plastová pipetka
3. Návod na použitie
4. Sušidlo - látka proti navlhnutiu (Nepoužíva sa!)

Skladovanie:

Testovaciu súpravu skladujte pri teplote (2° - 30° C) v utesenom obale do dátumu expirácie. Testovacia súprava by mala byť chránená pred slnečným žiarením, vlhkom a teplotou.

Upozornenie:

1. Testovacia súprava je určená na použitie in vitro (samodiagnostika).
2. Pred použitím si prečítajte dôkladne návod na použitie.
3. Testovacia súprava je určená len na jedno použitie.
4. Nepoužívajte, pokiaľ je ochranný obal poškodený.
5. Akonáhle ste ochranný obal otvorili, testovaciu kazetu ihneď použite.
6. Po použití testovaciu kazetu ihneď znehodnoťte, aby nedošlo k prípadnej infekcii.
7. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Testovanie:

1. Kedy môžem test použiť?

Test možno použiť už 5 - 7 dní po počatí.

2. Prevedenie testu

Odoberte vzorku moču do čistej nádoby. Najlepší je ranný moč, nakoľko má hormón HCG najvyššiu koncentráciu, ale môže byť použitá aj vzorka moču odobratá kedykoľvek v priebehu dňa.

1. Test aplikujte pri izbovej teplote. Otvorte ochranný obal a vyberte testovaciu kazetu.
2. Priloženou pipetkou nasajte odobratý moč. Do kruhového otvoru nakvapkajte 4 kvapky vzorky moču.
3. Počkajte, pokiaľ sa v kontrolnom okienku objavia farebné čiarky. V závislosti od koncentrácie HCG hormónu sa výsledky môžu ukázať do 40 sekúnd. Kompletný výsledok by mal byť viditeľný do 5 minút. Nikdy nezisťujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 10 minút od aplikácie vzorky moču.

Vyhodnotenie výsledku testu:

Negatívny výsledok:

Pokiaľ sa v kontrolnom okienku vedľa „C“ objaví len jedna čiarka, znamená to, že nie ste tehotná. Ak sa však menštruácia nedostavila, zopakujte test s novou kazetou.

Pozitívny výsledok:

Pokiaľ sa v kontrolnom okienku objavia dve farebné čiarky vedľa „C“ i „T“, znamená to, že ste tehotná. HCG hormón bol detekovaný vo Vašom moči. Jedna čiarka môže byť svetlejšia ako druhá, čo však nemá žiadny vplyv na pozitívny výsledok.

Chybný výsledok:

Ak sa v kontrolnom okienku nezobrazí žiadna čiarka, test bol vykonaný chybné. Test opakujte s novou kazetou.



Charakteristika

1. Citlivosť

Jednokrakový kazetový tehotenský test ukáže pozitívne výsledky so vzorkami moču obsahujúcimi HCG na úrovni 10 mIU/ml.

2. Presnosť

Na základe klinických laboratórnych testov bola presnosť testu > 99,5%. Výsledky testu majú informatívny charakter. Pre potvrdenie výsledkov kontaktujte svojho lekára.

Výrobca a distribútor:



IMPERIAL VITAMINS

Imperial VITAMINS, s.r.o.


Horná 13, 038 61 Vrútky

Slovensko

tel.: 043/4001082, fax: 043/4001084

e-mail: womansecret@womansecret.sk

web: www.tehotensketesty.sk, www.imperialvitamins.sk

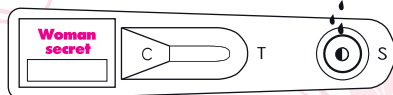

CE 1023

P81306

Vydanie 23/10/2012
Revízia 30/09/2015

V predaji aj ďalšie testy z rady „Woman secret“

Woman secret „RIGHT TIME“

Jednokrakový LH ovulačný test