

NOVAMA[®] FAMILINO

by **FLAEM[®]**

SINCE 1966
MADE IN ITALY

NÁVOD NA POUŽITIE

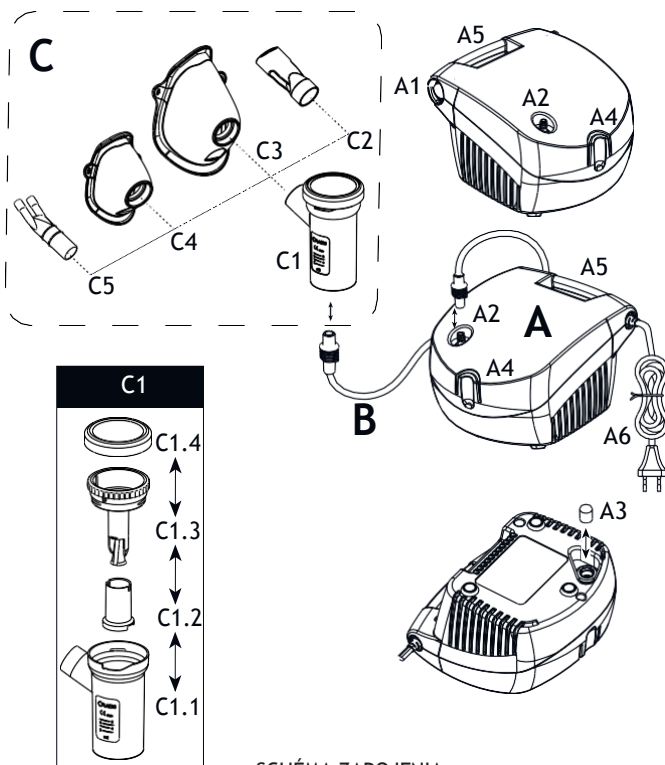


SCHÉMA ZAPOJENIA



Type Approved

www.tuv.com
ID 2000000000



Familino

Mod. P0111EM F400

ZARIADENIE PRE AEROSOLOVÚ TERAPIU

Blahoželáme vám ku kúpe a ďakujeme za dôveru.

Naším cieľom je uspokojiť potreby klientov poskytovaním najmodernejších produktov na liečbu ochorení dýchacích ciest. Prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

Zariadenie by sa malo používať podľa popisu v ďalšej časti tohto návodu. Je to zariadenie pre domáce použitie, určené na inhaláciu použitím nebulizéra predpísaného alebo odporúčaného lekárom

OBSAH BALENIA:

- | | |
|--|--|
| A - Zariadenie na aerosólovú terapiu (hlavná jednotka) <ul style="list-style-type: none">A1 - Tlačidlo zapnutiaA2 - Nasávanie vzduchuA3 - Filter vzduchuA4 - Držiak rozprašovačaA5 - Rúčka na prenosA6 - El. kábel | C - Príslušenstvo <ul style="list-style-type: none">C1 - rozprašovač RF8 Evo<ul style="list-style-type: none">C1.1 - Časť dolnáC1.2 - Trubica na filtrovanie častícC1.3 - Časť hornáC1.4 - Šetriča lieku "Drug- saver"C2 - NáustokC3 - Maska SoftTouch pre dospelýchC4 - Maska SoftTouch pre detiC5 - Koncovka do nosa pre dospelých |
| B - Pripojovacia hadička (hlavná jednotka / nebulizátor) | |



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Toto zariadenie je tiež určené na priame použitie pacientom.
- Pred prvým použitím a pravidelne počas používania výrobku kontrolujte konštrukčnú celistvosť prístroja a el. kábla, aby ste sa uistili, že nedošlo k poškodeniu. V prípade poškodenia nezasúvajte kábel do elektriny a výrobok pošlite do servisného strediska NOVAMA alebo servisu uvedenému v návode.
- Ak zariadenie nespĺňa požiadavky, obráťte sa na linku pomoci, kde vám budú poskytnuté ďalšie informácie.
- Priemerná životnosť príslušenstva je 1 rok. V prípade intenzívneho používania sa však odporúča, aby sa príslušenstvo vymieňalo každých 6 mesiacov (alebo skôr, ak je potrebné), aby sa zabezpečila účinnosť liečby.
- V prítomnosti detí alebo nezaopatrených osôb musí byť prístroj pod prísny dohľadom dospeléj osoby, ktorá si prečítala návod na obsluhu.
- Niektoré komponenty zariadenia sú veľmi malé, čo znamená, že deti ich môžu prehltnúť, preto ich uchováajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte káble, ktoré sú súčasťou zariadenia na iné účely, než je uvedené, pretože predstavujú potenciálne riziko usmrtenia. Osobitnú pozornosť venujte deťom a ľuďom so špeciálnymi problémami, pretože nie vždy dokážu správne posúdiť nebezpečenstvo.
- Zariadenie nie je určené na použitie s anestetickými zmesami, ktoré sú horľavé pri kontakte so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom dusným.
- Dbajte na to, aby bol el. kábel mimo dosahu horúcich povrchov.
- El. kábel musí byť umiestnený mimo dosahu zvierat (napr. hlodavcov), ktoré by mohli poškodiť jeho izoláciu.
- Nepoužívajte prístroj ak máte mokré ruky. Nepoužívajte zariadenie na vlhkom mieste

(napr. pri kúpaní alebo sprchovaní). Zariadenie neponárajte do vody; ak sa dostane do kontaktu s vodou okamžite odpojte zástrčku. Nedotýkajte sa zariadenia ponoreného do vody; najprv vytiahnite zástrčku. Potom by malo byť zariadenie okamžite zaslané do servisného strediska.

Zariadenie by sa malo používať iba v bezprašnom prostredí, inak môže nepriaznivo ovplyvniť liečbu.

- Neumývajte prístroj pod tečúcou vodou alebo ponorením; Chráňte prístroj pred striekajúcou vodou a inými kvapalinami.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo do prostredia s vysokou teplotou.
- Nezakrývajte ani nevkladajte predmety do samotného filtra ani do jeho zásuvky v prístroji.
- Neblokujte ventilačné otvory na oboch stranách zariadenia.
- Vždy sa uistite, že zariadenie pracuje na tvrdom povrchu bez akýchkoľvek prekážok.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory.
- Do ventilačných otvorov nevkladajte žiadne predmety.
- Opravy, vrátane výmeny el. kábla, smú vykonávať len autorizovaní pracovníci na základe pokynov výrobcu. Opravy bez autorizácie majú za následok zánik záruky a môžu byť zdrojom nebezpečenstva pre používateľa.
- Priemerná očakávaná životnosť jednotlivých skupín kompresorov: F400: 400 hodín.
- **UPOZORNENIE:** Bez povolenia výrobcu nevykonávajte žiadne zmeny na zariadení.
- Výrobca, predajca a dovozca sú zodpovední za bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzkové parametre len vtedy, ak: a) je prístroj prevádzkovaný v súlade s návodom na obsluhu; b) elektrická inštalácia v prevádzkovej miestnosti prístroja je vhodná a spĺňa požiadavky platných predpisov.
- Interakcie: materiály použité v kontakte s liekmi boli testované v kontakte so širokou škálou liekov. Nie je však možné úplne vylúčiť interakciu kvôli rôznorodosti a neustálemu vývoju liekov. Odporúča sa používať liek čo najskôr po otvorení a vyhnúť sa dlhodobému kontaktu s rozprašovačom.
- Oznáme problémy a / alebo poruchy výrobcovi. V prípade potreby sa s nimi obráťte aj na vysvetlenie týkajúce sa používania a / alebo údržby / čistenia.
- Ďalšie účinky: Materiály použité v zariadení sú biokompatibilné materiály, ktoré vyhovujú platným požiadavkám smernice ES 93/42 ES a následným zmenám, avšak alergické reakcie nie je možné úplne vylúčiť.
- Čas potrebný na prechod zo skladovacieho do pracovného stavu je približne 2 hodiny.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY


Pred každým použitím si dôkladne umyte ruky a potom prístroj vyčistíte podľa popisu v kapitole "ČISTENIE, DEZINFEKČIA". Nádoba a príslušenstvo sú určené na osobné použitie, aby sa zabránilo možnému prenosu chorôb. Zariadenie je určené na podávanie liekov a iných typov látok podávaných inhaláciou. Takéto látky by mal vždy predpisovať lekár. Pri látkach s nadmernou hustotou môže byť potrebné zriediť ich vhodným fyziologickým roztokom, ako Vám predpísal Váš lekár. Počas používania sa odporúča adekvátne chrániť pred možným odkvapkaním inhalujúceho roztoku.

1. Elektrický kábel (A6) zasunúť do elektrickej zásuvky, ktorá zodpovedá napätiu zariadenia. Zásuvka musí byť na mieste, ktoré zabezpečuje rýchle odpojenie od siete v prípade potreby.

2. Liek predpísaný lekárom umiestnite v spodnej časti (C1.1). Zostavte rozprašovač podľa pokynov v kapitole "SPÔSOBY POUŽÍVANIA NEBULIZÉRA RF8 Evo".
3. Pripojte príslušenstvo podľa "Schéma pripojenia" zobrazeného na kryte.
4. Pohodlne si sadnite, držte nebulizér v ruke, položte náustok na ústa alebo použite koncovku do nosa alebo masku. Keď používate masku, umiestnite ju na tvár tak, ako je to znázornené na obrázku (s alebo bez gumy).
5. Zapnite prístroj tlačidlom zap. (A1) a vykonajte hlboké nádychy a výdychy. Odporúča sa, aby nádech trval tak dlho, aby sa kvapky inhalovaného aerosólu mohli usadiť. Potom pomaly vydýchajte.

6. Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky.
POZNÁMKA: Ak sa po inhalácii v pripojovacej hadičke (B) nahromadí vlhkosť, odpojte hadičku a vysušte ju pomocou vlastnej ventilácie kompresora, aby ste sa vyhli

možnému množeniu plesní vo vnútri hadičky.

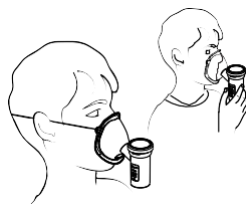


SPÔSOB POUŽITIA NEBULIZÁTORA „RF8 Evo“

Nastavenie pre nebulizáciu vhodnú pre dolné dýchacie cesty (alveoly)..

Nastavenie pre nebulizáciu vhodnú pre dolné dýchacie cesty (alveoly)..



Do hornej časti C1.3 umiestnite trubicu na filtrovanie častíc C1.2.

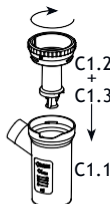


Hornú časť (C1.3 + C1.2) umiestnite do spodnej časti C1.1. Otočte v smere hodinových ručičiek.



Šetrič liekov "Drug Saver" obmedzuje rozptýlenie lieku počas liečby a znižuje nebezpečenstvo zasiahnutia oka pri vydychovaní.

Nastavenie pre nebulizáciu vhodné pre stredne-horné dýchacie cesty (bronchiálny trakt).

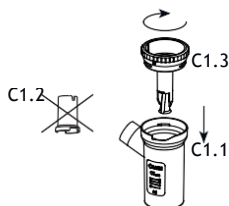


Hornú časť C1.3 vložte do spodnej časti C1.1. Otočte v smere hodinových ručičiek.



Nasad'te "Drugsaver" na šetrenie liekov (C1.4).


MASKY SOFT TOUCH

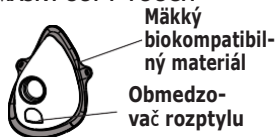

Vonkajší okraj masiek SoftTouch je vyrobený z mäkkého, biokompatibilného materiálu, ktorý poskytuje optimálnu prilnavosť na tvár. Maska je tiež vybavená inovatívnym obmedzovačom rozptylu. Tieto charakteristické prvky špecifické pre produkt umožňujú efektívnejšie dodávanie lieku do tela pacienta, ako aj obmedzenie rozptylu.



Počas nádychu jazyček pôsobí ako obmedzovač rozptylu v ohybe vnútri masky

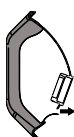

Počas výdychu pôsobí pero ako obmedzovač rozptylu, ktorý sa ohýba mimo masky.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA

Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte kábel do zásuvky.

ČISTENIE ZARIADENIA A VONKAJŠÍCH ČASTÍ.

Používajte iba navlhčenú handričku s antibakteriálnym čistiacim prostriedkom (neabrazívny, bez pridania rozpúšťadiel).

PRÍSLUŠENSTVO

Nebulizér demontujte tak, ako je uvedené v "Schéme pripojenia" v časti C1. Potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

ČISTENIE

Pred a po každom použití musí byť nádoba a príslušenstvo očistené jedným zo spôsobov opísaných nižšie.

Metóda A: Očistíte príslušenstvo C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5 použitím teplej pitnej vody (cca 40 ° C) a jemnej neabrazívnej umývacej zmesi.

Metóda B: Očistíte príslušenstvo C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5 v umývačke riadu pomocou cyklu teplej vody.

Metóda C: Očistíte príslušenstvo C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5 ponorením do roztoku pozostávajúceho z 50% vody a 50% bieleho octu, potom opláchnite s množstvom teplej pitnej vody (okolo 40 ° C).

Ak chcete časti dezinfikovať, prejdite do časti DEZINFEKCIA.

Po očistení príslušenstva by sa všetky časti mali dôkladne vysušiť položením na papier, uterák alebo ho dať pod suchý prúd teplého vzduchu (napr. pomocou sušiča vlasov).

DEZINFEKCIA

Po očistení nádoby a príslušenstva ich dezinfikujte jedným zo spôsobov opísaných nižšie.

Metóda A: Príslušenstvo, pre ktoré sa vyžaduje dezinfekcia: C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5.

Dezinfekčný prostriedok patriaci do skupiny elektrolyticky oxidujúcich látok s obsahom chlóru (účinná látka: chlórnan sodný) určený na dezinfekciu. Môžete si ho kúpiť v lekární.

Ako na to:

- Naplňte nádobu vhodnej veľkosti tak, aby sa do nej zmestili všetky jednotlivé zložky, ktoré sa majú dezinfikovať roztokom pitnej vody a dezinfekčným prostriedkom pripraveným v súlade s pomermi uvedenými na obale dezinfekčného prostriedku.

- Úplne ponorte každý jednotlivý komponent do roztoku, pričom dbajte na to, aby sa zabránilo tvorbe vzduchových bublín v kontakte s dielmi. Nechajte prvky ponorené v roztoku po dobu uvedenú na obale dezinfekčného prostriedku podľa zvolenej koncentrácie roztoku.
- Dezinfikované zložky odstráňte a dôkladne opláchnite vo vlažnej pitnej vode.
- Odstráňte roztok podľa pokynov výrobcu dezinfekčného prostriedku.

Metóda B: Dezinfikujte príslušenstvo **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5** ich varom 10 minút; používajte demineralizovanú alebo destilovanú vodu, aby sa zabránilo usadzovaniu vodného kameňa.


Metóda C: Dezinfikujte príslušenstvo **C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5** parným sterilizátorom (bez mikrovlnnej rúry). Riad'te sa pokynmi presne podľa pokynov priložených k sterilizátoru. Aby bola dezinfekcia účinná, vyberte sterilizátor s minimálne 6-minútovým prevádzkovým cyklom.

Po dezinfekcii príslušenstva by sa mali dôkladne vysušiť položením na papierový uterák alebo vysušiť prúdom teplého vzduchu (napr. Sušičom vlasov).

Po použití zariadenie a príslušenstvo skladujte na suchom mieste, chránené pred prachom.

FILTRÁCIA VZDUCHU

Prístroj je vybavený absorpčným filtrom (A3), ktorý sa musí vymeniť, ak je znečistený alebo zmenil farbu. Je zakázané umývať a opätovne používať ten istý filter. Pravidelná výmena filtra je nevyhnutná na zabezpečenie správnej prevádzky kompresora. Filter by sa mal pravidelne kontrolovať. V prípade záložných filtrov sa obráťte na predajcu zariadenia alebo autorizované servisné stredisko.

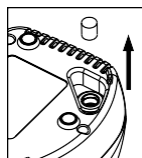

Ak chcete vymeniť filter, vytiahnite ho podľa obrázka..

Filter bol vyrobený spôsobom, ktorý umožňuje jeho stabilné umiestnenie v priestore pre filter. Pri používaní zariadenia nemeňte filter.

Používajte iba originálne príslušenstvo a náhradné diely NOVAMA-FLAEM. Za používanie originálnych náhradných dielov alebo príslušenstva nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred začatím akejkoľvek činnosti vypnite zariadenie a odpojte kábel zo zásuvky.

PROBLEM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	El. kábel nie je správne pripojený do elektrickej zásuvky	El. kábel zasunúť správne do zásuvky.
 Zariadenie rozstrekuje paru len v malom množstve, alebo vôbec.	Do nebulizéra nebol vložený žiadny liek.	Do nebulizéra vložte správne množstvo lieku.
	Nebulizér nebol správne nainštalovaný.	Odmontujte a namontujte rozprašovač správne, ako je znázornené v schéme pripojenia na kryte.
	Tryska rozprašovača je upchatá.	Odmontujte rozprašovač, vyberte trysku a vyčistite. Upchatie rozprašovača zvyškami liekov ohrozuje jeho účinnosť a funkčnosť. Dodržiavajte pokyny v kapitole ČISTENIE, DEZINFEKČIA, DEZINFEKČIA.
	Vzduchová hadica nie je správne pripojená k zariadeniu.	Skontrolujte pripojenie vzduchového otvoru zariadenia a prislúšenstva (pozri obr schéma pripojenia na kryte).
	Vzduchová hadica je stlačená, poškodená alebo navinutá.	Rozviňte hadicu a skontrolujte, či nie je zlomená alebo prasknutá. V prípade potreby ho vymeňte.
Zariadenie pracuje hlasnejšie ako obvykle	Vzduchový filter je znečistený	Vymeňte filter.
	Filter nie je správne zasunutý.	Filter správne zatlačte až na koniec.

Ak po kontrole vyššie opísaných podmienok zariadenie stále nefunguje hladko, obráťte sa na asistenčnú linku pomoci alebo na predajcu.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Zariadenie bolo navrhnuté v súlade s aktuálnymi požiadavkami v oblasti elektromagnetickej kompatibility (EN 60601-1-2: 2015). Pri inštalácii a prevádzke elektromechanických zariadení je potrebná špeciálna starostlivosť o požiadavky EMC. V súvislosti s vyššie uvedeným by sa inštalácia a / alebo servis mali riadiť pravidlami uvedenými výrobcom. Existuje riziko potenciálneho elektromagnetického rušenia s inými zariadeniami. Prenosné a mobilné telekomunikačné zariadenia využívajúce rádiovú frekvenciu (mobilné telefóny alebo bezdrôtové spojenia) môžu rušiť prevádzku elektromechanických zariadení. Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.flaemnuova.it. Prístroj môže byť citlivý na elektromagnetické rušenie v prítomnosti iných zariadení používaných na diagnostiku alebo liečbu. Výrobca si vyhradzuje právo na technické a funkčné zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

SYMBOLY

Certifikát TÜV



Lekárske CE pre výroby
lekárske, ref. dir. 93/42 EHS,
v znení neskorších predpisov

Zariadenie triedy II

Dôležité upozornenia:
prečítajte si návod



Zapnutý
"ON"

Po vypnutí
zariadenia spínač
preruší prevádzku
kompresora len na
jednej z dvoch fáz
napájania.

Vypnutý "OFF"



Vyhovuje európskej norme
EN 10993-1 Biologické
hodnotenie výrobkov
a 93/42 / EHS Smernice o
zariadeniach. nie
obsahuje ftaláty. Súlad s: (ES) č.
1907/2006



Minimálna a maximálna teplota
okolia



Minimálny a maximálny
atmosférický tlak



Sériové číslo



Výrobca



Zariadenie typu BF



Striedavý prúd



Nepoužívajte spotrebič pri
sprchovaní alebo vani.

Nebezpečenstvo: úraz elektrickým
prúdom. Dôsledky: smrť.

IP21

Stupeň ochrany krytia: IP21.
(Chránené pred pevnými predmetmi
väčšími ako 12 mm, chránené pred
vložením prsta, chránené pred
kvapkami vody padajúcimi zvisle.)



Minimálna a maximálna vlhkosť vzduchu

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Podľa smernice 2012/19 / EŠ symbol umiestnený na zariadení znamená, že podlieha
selektívnemu zberu a mal by sa takto odstrániť. Užívateľ je preto povinný doručiť
(alebo objednať odber) takýto odpad do zberných miest prevádzkovaných na základe
vydaných povolení

miestnymi orgánmi, alebo ich dodať predávajúcemu v čase nákupu nového
zariadenia na ten istý účel. Selektívny zber odpadov a ich následné spracovanie,
zhodnocovanie a zneškodňovanie umožňujú vývoj výrobných zariadení s využitím
recyklovaných materiálov a znižujú negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie,
ku ktorým dochádza v prípade nesprávneho nakladania s odpadom. Užívatelia, ktorí
zneškodňujú odpad v rozpore so zákonom, budú potrestaní v súlade s predpisom čl.
50 a neskoršie aktualizácie podľa zákona č. 22/1997 Z. z.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Mod. P0111EM F400

Napájanie:	230V~ 50Hz 130VA	115V ~ 60Hz	220V ~ 60Hz
Bezpečnostné schválenia:			

Maximálny tlak: 1,8 ± 0,3 bar
Prúdenie vzduchu do kompresora: 9 l/min (približne)
Úroveň hluku (na 1 m) 54 dB (A) (približne)
Práca: nepretržitá

Prevádzkové podmienky:

Telota: min 10 °C; max 40 °C
Vlhkosť vzduchu: min 10%; max 95%
Atmosférický tlak: min 69 KPa; max 106 KPa

Podmienky skladovania:

Teplota: min -25 °C; max 70 °C
Vlhkosť vzduchu: min 10%; max 95%
Atmosférický tlak: min 69 KPa; max 106 KPa

Rozmery: 16,8 (d) x 17,2 (š) x 10,7 (v) cm
Váha: 1,2 kg

POUŽITÉ ČASTI

Príslušenstvo BF zahŕňa: pre pacienta (C2, C3, C4, C5)

Nebulizátor RF8 Evo

Minimálny objem liečiva: 2 ml
Maximálny objem liečiva: 8 ml
Pracovný tlak (s rozprašovačom): 0,80 bar (približne).

	S vloženou trubicou C1.2	Bez vloženej trubice zmeňte číslo C1.2
⁽¹⁾ Množstvo:	0,30 ml/min (približne)	0,40 ml/min (približne)
MMAD:	3,74 μm ⁽³⁾	4,48 μm ⁽²⁾
Inhalačná frakcia < 5 μm (FPF):	63,2% ⁽³⁾	55,5% ⁽²⁾

(1) údaje namerané v súlade s vnútorným postupom Flaem I29-P07.5

(2) Charakteristiky in vitro certifikované spoločnosťou TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Nemecko v súlade s európskou normou pre zariadenia na aerosólovú terapiu, norma EN 13544-1. Viac informácií na požiadanie.

(3) Charakteristiky in vitro testované na Univerzite v Parme v súlade s európskou normou pre pomôcky aerosólová terapia Norma EN 13544-1. Viac informácií na požiadanie.

ZÁRUKA

Výrobca zaručuje Kupujúcemu, že zariadenie NOVAMA, na ktoré sa táto záruka vzťahuje, bolo navrhnuté a vyrobené na základe vysokých štandardov kvality a kvalitného vybavenia, nedostatku materiálových a výrobných chýb, ktoré by mohli rušiť jeho správnu prevádzku. V prípade závad, poškodení a väd, ktoré boli odhalené počas trvania tejto záruky, ručiteľ bezplatne opraví alebo vymení zariadenie za nové v lehote, ktorá je 30 dní.

Distribútor

Mlongauer s.r.o, Farská 12, 949 01, Nitra

Infolinka technickej pomoci

tel.: +421940404831

e-mail: mlongauer@mlongauer.sk

DOBA ZÁRUKY

- Na zariadenie (kompresor): 5 rokov alebo doživotná záruka pre domácich používateľov po registrácii na webovej stránke: www.novama.pl/gwarancja
- Na príslušenstvo sa nevzťahuje žiadna záruka
- Záruka je platná od dátumu nákupu potvrdeného dokladom o kúpe, ktorý musí byť priložený k záručnému listu.
- Táto záruka sa vzťahuje na územie SR.

Podmienky platnosti záruky

Na zachovanie platnosti záruky spolu s reklamovaným zariadením musíte poskytnúť tento záručný list (riadne vyplnený) a doklad o kúpe obsahujúci dátum zakúpenia spolu s názvom zakúpeného zariadenia.

Obmedzenia a vylúčenia záruky

1. Záruka neposkytuje žiadnu náhradu za nepriame alebo priame škody spôsobené osobám alebo zariadeniam, keď zariadenie nefungovalo alebo bolo na mieste.
2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, ako aj na chyby a škody vyplývajúce z:
 - a) nevhodného užívania (nie podľa zamýšľaného účelu) alebo spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie,
 - b) nesprávnymi alebo nekompatibilnými pokynmi na skladovanie a údržbu (napr. použitie nevhodných čistiacich prostriedkov) a použitie nesprávneho spotrebného materiálu,
 - c) rušenie neoprávneného servisu, svojvoľných opráv, zmien a stavebných zmien,
 - d) vonkajšie dôvody (atmosférické javy, prepätia v rozvodnej sieti, nesprávne napájanie atď.)
3. Záruka sa nevzťahuje na poruchu výrobku v dôsledku zmien vlastností (poškodenia) komponentov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu. Záručné opravy nesúvisia s údržbou a čistením zariadenia podľa návodu na obsluhu

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST SA MUSÍ VYPLNIŤ A DOLOŽIŤ S VADNÝM ZARIADENÍM. DÔLEŽITOU PODMIENKOU JE DODANIE DOKLADU O NÁKUPE.

Sériové číslo	
Dátum nákupu	
Pečiatka a podpis predávajúceho	

Fabbricante/ Fabricant
FLAEMNUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
(Brescia) - ITALY
Tel. +39 030 9910168 r.a.
Fax +39 030 9910287
www.flaem.it

2018 FLAEM NUOVA®
All right reserved
cod. 18399 Rev. 06/2018
(TÜV A1)