

Pozorne si prečítajte návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie pre pacienta o používaní **Dr. Max Spreja do hrdla**. Uschovajte si ho, aby ste si ho v prípade potreby mohli opäť prečítať.

Zdravotnícka pomôčka **Dr. Max Sprej do hrdla** je prípravok, ktorý neobsahuje alkoholové extrakty, a preto nedráždi citlivú sliznicu hrdla a úst.

Zloženie:

Demineralizovaná voda, glycerín, nanostriebro 100 ppm, sorbitol, jahodová príchuť, kyselina citrónová, polysorbát 20, mäťový olej, sorban draselný, sukralóza, extrakt zo stielky lišajníka islandského.

Forma:

Zdravotnícka pomôčka vo forme spreja (tekutina obsahujúca aplikátor) v 30 ml fľaštičke (300 dávok).

Použitie:

Zdravotnícku pomôcku **Dr. Max Sprej do hrdla** možno použiť podporne:

- pri zápale mandlí,
- po odstránení mandlí,
- pri zápale sliznice hltana,
- pri zápale sliznice ústnej dutiny.

Indikácie:

Tento produkt je určený dospelým a deťom nad 6 rokov.

Kontraindikácie:

Nepoužívajte, ak ste precitlivení (alergickí) na akúkoľvek zložku tohto produktu. Zabráňte kontaktu s očami.

Prestaňte produkt používať, ak zaznamenáte akékoľvek nepohodlie. Akákoľvek závažná nehoda, ku ktorej došlo v súvislosti s pomôckou, by mala byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko.

Nepoužívajte po dátume expirácie.

Používanie tejto zdravotníckej pomôcky počas tehotenstva a dojčenia je potrebné konzultovať so svojím lekárom.

Spôsob použitia:

Pred prvým použitím niekoľkokrát stlačte dávkovač, aby sa naplnil tekutinou.

Vložte aplikátor do úst a stlačte ho 1 – 2-krát smerom do hrdla. Odporúča sa použiť ho 3 – 4-krát denne 1 – 2 dávky po jedle. Z hygienických dôvodov a na prevenciu šírenia infekcie by malo byť jedno balenie určené pre jednu osobu. Po každom použití je potrebné špičku umyť pod tečúcou vodou a jemne osušiť.

Skladovacie podmienky:

Uchovávať v pôvodnom balení pri teplote od 5 °C do 25 °C.

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte, ak je obal poškodený.

Vysvetlenie použitých symbolov:

SYMBOL	VÝZNAM
	Číslo šarže
	Dátum expirácie
	CE – potvrdenie súladu s normami EÚ
	Hranice teploty
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený
	Výrobca
	Varovanie
	Pozri návod na používanie

Dátum vydania: 02/2023

PL Spray do gardła

Dr.Max⁺

Wyrób medyczny

Instrukcja używania

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu **Dr. Max Spray do gardła**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie ją przeczytać.

Wyrób medyczny **Dr. Max Spray do gardła** to preparat, który nie zawiera wyciągów alkoholowych, dlatego nie podrażnia wrażliwej błony śluzowej gardła i jamy ustnej.

Skład:

Woda demineralizowana, gliceryna, nanosrebro 100 ppm, sorbitol, aromat truskawkowy, kwas cytrynowy, polisorbat 20, olejek z mięty pieprzowej, sorbinian potasu, sukraloza, ekstrakt z plechy porostu islandzkiego.

Dostępne opakowania:

Wyrób medyczny w postaci spray'u (płyn u zawierającego aplikator) umieszczonego w butelce o pojemności 30 ml (300 dawek).

Zastosowanie:

Wyrób medyczny **Dr. Max Spray do gardła** może być stosowany wspomagająco podczas:

- zapalenia migdałków podniebiennych,
- po usunięciu migdałków podniebiennych,
- zapalenia błony śluzowej gardła,
- zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

Wskazania:

Produkt jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu. Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Nie należy używać po upływie terminu ważności. Stosowanie wyrobu medycznego w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem.

Sposób używania:

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem.

Należy umieścić aplikator w jamie ustnej i naciskając rozpylić w kierunku gardła 1-2 dawki. Zaleca się stosować 3 do 4 razy dziennie po 1-2 dawki jednorazowo, po posiłku. Ze względów higienicznych oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji, jedno opakowanie należy przeznaczyć dla jednej osoby. Po każdym użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Wyjaśnienie użytych symboli:

SYMBOL	ZNACZENIE
	Numer partii
	Użyć do daty
	CE – potwierdzenie spełnienia norm UE
	Dopuszczalna temperatura
	Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone
	Producent
	Ostrzeżenie
	Zajrzyj do instrukcji używania

Data wydania: 02/2023

 **Producent:**
GLOBAL PHARMA CM S.A.
ul. Berezów 49A,
26-130 Suchedniów, Polska

Dystrybutor:
Dr. Max Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 60a,
54-613 Wrocław, Polska



Wyrób
medyczny

30 ml

VER0925

Dr.Max⁺ Dr.Max DBC, Florentinum (D), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1		COLORS		SPECIALS	
PRODUCT NAME:	Sore Throat Spray - PIL - IT/PL		Black		
BAR CODE:	8595566428259				
DIMENSION (rozměr):	120 x 200 mm				
DATE:	09. 09. 2025				
ARTWORK SUPPLIER: GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz					