



Woman secret

Jednokrokový HCG tehotenský test - prúžok

Určené na samodiagnostiku

Baby

Vybrali ste si vysokokvalitný tehotenský test, ktorý zisťuje prítomnosť HCG hormónu v moči pre skoré zisťovanie gravidity. Vysoká citlivosť testu a jeho presnosť Vám pri správnom použití testu umožní zistiť Vaše tehotenstvo už 5 -7 dní po počatí. Manipulácia s testom je jednoduchá a rýchla. Test je možné použiť v priebehu celého dňa. Jednokrokový tehotenský HCG test je určený pre domáce použitie.

Testovacia súprava obsahuje:

1. Testovací prúžok
2. Návod na použitie
3. Sušidlo - látka proti navlhnutiu (Nepoužíva sa!)

Skladovanie

Testovaciu súpravu skladujte pri teplote (2° - 30°C) v utesnenom obale do dátumu expirácie. Testovacia súprava má byť chránená pred slnečným žiarením, vlhkom a teplom.

Upozornenie

1. Testovacia súprava je určená na použitie in vitro (samodiagnostika).
2. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.
3. Testovacia súprava je určená len na jedno použitie.
4. Nepoužívajte, pokiaľ je ochranný obal poškodený.
5. Akonáhle ste ochranný obal otvorili, testovací prúžok ihneď použite.
6. Po použití testovací prúžok znehodnotte, aby nedošlo k prípadnej infekcii.
7. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Testovanie:

1. Kedy môžem test použiť?

Test možno použiť už 5 - 7 dní po počatí.

2. Ako narábať s testovacím prúžkom?

Odoberte vzorku moču do čistej nádoby. Najlepší je raňajší moč, nakoľko má hormón HCG najvyššiu koncentráciu, ale môže byť použitá aj vzorka moču odobratá kedykoľvek v priebehu dňa.

3. Prevedenie testu


1. Test aplikujte pri izbovej teplote. Otvorte ochranný obal a vyberte testovací prúžok.
2. Uchopte prúžok za modrý koniec opačného konca sa nedotýkajte, nakoľko by mohlo dôjsť ku skresleniu výsledku a ponorte ho na 10 sekúnd do nádoby so vzorkou moču po vyznačenú časť (←MAX).
3. Prúžok položte na podložku a počkajte, pokiaľ sa objavia farebné čiarky. V závislosti od koncentrácie HCG hormónu sa výsledky môžu ukázať do 40 sekúnd. Kompletný výsledok by mal byť viditeľný do 5 minút. Nikdy nezisťujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 10 minút od aplikácie vzorky moču.

4. Vyhodnotenie výsledku testu

Negatívny výsledok: v testovacej časti sa objaví jedna ružová čiarka, ktorá potvrdzuje, že nie ste tehotná. Ak sa však menštruácia nedostavila, zopakujte test s novým prúžkom.

Pozitívny výsledok: ak sa objavia dve ružové čiarky v testovacej časti, znamená to, že ste tehotná. HCG hormón bol detekovaný vo Vašom moči. Jedna čiarka môže byť svetlejšia ako druhá, čo však nemá žiadny vplyv na pozitívny výsledok.

Chybný výsledok: ak sa v kontrolnom okienku nezobrazí žiadna čiarka, test bol vykonaný chybné. Test opakujte s novým prúžkom.

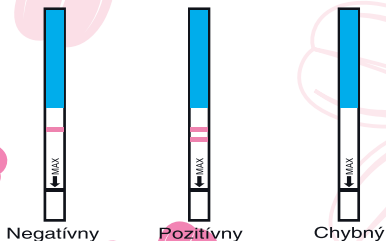

Charakteristika

1. Citlivosť

Jednokrokový prúžkový tehotenský test ukáže pozitívne výsledky so vzorkami moču obsahujúcimi HCG na úrovni 10 mIU/ml.

2. Presnosť

Na základe klinických laboratórnych testov bola presnosť testu > 99,5%. Výsledky testu majú informatívny charakter. Pre potvrdenie výsledkov kontaktujte svojho lekára.

Výrobca a distribútor:



IMPERIAL VITAMINS

Imperial VITAMINS, s.r.o.

Horná 13, 038 61 Vrútky

Slovensko

tel.: 043/4001082, fax: 043/4001084

e-mail: womansecret@womansecret.sk

web: www.tehotensketesty.sk, www.imperialvitamins.sk

V predaji aj ďalšie testy z rady „Woman secret“

Woman secret „RIGHT TIME“

Jednokrokový LH ovulačný test



P81306

Vydanie 23/10/2012
Revízia 30/09/2015

