

Femtime Vaginal Wash



Vaginální výplach

Je založený na účinku kyseliny borité, aloe vera a kyseliny mléčné
Balení obsahuje 3 lahvičky po 100 ml + 3 aplikátory.

NÁVOD K POUŽITÍ

Femtime Vaginal Wash je vaginální výplach určený k aplikaci do pochvy; je příjemný a jemný, zanechávající pocit svěžesti a čistoty. Je užitečný v případě suchosti vagíny a jako prevence a léčba podráždění, svědění a pálení. Femtime Vaginal Wash je zdravotnický prostředek s kyselým pH, který pomáhá udržet neporušenou přirozenou obranyschopnost vagíny.

Návod na použití:

Výplach pochvy je možné provést jednou či víckrát za den. Upřednostňuje se aplikovat Femtime Vaginal Wash na noc před spaním.

1. Umyjte si řádně ruce před použitím.
2. Protřepejte lahvičku.
3. Ulomte těsnění zatlačením dozadu.
4. Vyměňte aplikátor z ochranného obalu a mírným tlakem jej vložte do otvoru na lahvičce.
5. Provádějte výplach zavedením kanyly do pochvy, zatímco sedíte na bidetu či stojíte ve sprše nebo ve vaně. Obsah lahvičky pomalu vyprazdňujte jemným stiskem nádoby.
6. Vyměňte aplikátor a vyhoďte jej do odpadkového koše.

Složení:

Voda, glycerol, polysorbát 20, PEG-40 hydrogenovaný ricinový olej, kyselina mléčná, benzoan sodný, kyselina boritá, *Aloe barbadensis*, parfém, sorban draselný, *Melaleuca alternifolia*.

Upozornění:

Jedná se o produkt na jedno použití s jednou dávkou. Opakované použití nebo používání jedné lahvičky, roztoku nebo aplikátorů vícero osobami by mohlo ohrozit účinnost tohoto zdravotnického prostředku nebo by mohlo způsobit zhoršení stávajících potíží stejně tak, jako by se mohly vyskytnout problémy nové. Použijte celý obsah lahvičky pro každou jednotlivou aplikaci. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepolykejte. Pečlivě čtěte tento návod k použití. Nepoužívejte tento produkt v případě lézí nebo vaginálního poranění. Pokud používáte jiné léky nebo zdravotnické prostředky zároveň s výplachem, poraďte se svým lékařem před použitím tohoto produktu. Nepoužívejte během menstruace. Nepoužívejte tento produkt, je-li jeho obal poškozen. Nepoužívejte produkt po uplynutí doby

použitelnosti; datum expirace se vztahuje na neporušený a správně skladovaný produkt. Přerušte léčbu v případě podráždění nebo precitlivělosti na tento produkt. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem. Nepoužívejte tento zdravotnický prostředek po dobu delší než 30 po sobě jdoucích dnů. U těhotných a kojících žen a u dětí lze používat pouze v případě nutnosti pod přímým lékařským dohledem. V případě neporušené panenské blány se před použitím poraďte se svým gynekologem o konkrétních způsobech použití. Je důležité informovat lékaře nebo lékárnika o jakýchkoli nežádoucích účincích, které nejsou popsány v tomto návodu k použití.

Možné nežádoucí účinky:

Za normálních a přiměřeně předvídatelných podmínek použití nejsou v současné době známy žádné vedlejší účinky, které se konkrétně vztahují k použití tohoto produktu. Jeho snášenlivost byla ověřena, ale v případě podráždění nebo alergické reakce jej přestaňte používat a kontaktujte svého lékaře/gynekologa.

Balení obsahuje:

3 lahvičky po 100 ml + 3 aplikátory.

Datum poslední revize: 12/2019

Femtime Vaginal Wash



Vaginálny výplach

Na báze kyseliny boritej, Aloe vera a kyseliny mliečnej
3 fľaštičky so 100 ml + 3 aplikátory

NÁVOD NA POUŽITIE

Femtime Vaginal Wash je vaginálny výplach na aplikáciu do vagíny. Je príjemný a jemný, zanecháva pocit sviežosti a čistoty. Používa sa v prípade vaginálnej suchosti a na prevenciu alebo liečbu podráždenia, svrbenia a pálenia. Femtime Vaginal Wash je zdravotnícka pomôcka s kyslým pH, ktorá pomáha udržať neporušenú prirodzenú obranyschopnosť vagíny.

Návod na použitie:

Vaginálny výplach môžete používať raz alebo viackrát denne. Femtime Vaginal Wash je najlepšie použiť pred spaním.

1. Pred aplikáciou si dôkladne umyte ruky.
2. Pretrepte fľaštičku.
3. Zlomte uzáver zatlačením dozadu.
4. Vyberte aplikátor z ochranného obalu a nasadte ho na otvor na fľaštičke za pomoci mierneho tlaku na jej spodnú časť.
5. Keď sedíte na záchode, stojíte v sprche alebo vo vani, zaveďte aplikátor do vagíny a vypláchnite. Vaginálny výplach pomaly vyprázdňujte, jemným stlačením fľaštičky.
6. Po vyprázdnení fľaštičky s aplikátorom vyhoďte do odpadu.

Zloženie:

Voda, glycerín, polysorbát-20, hydrogenovaný ricínový olej PEG-40, kyselina mliečna, benzoát sodný, kyselina boritá, aloa pravá, parfum, sorban draselný, kajeput striedavolistý.

Upozornenie:

Na jednorazové použitie: opakované použitie alebo použitie jednej fľaštičky, jej obsahu alebo aplikátora viac ako jednou osobou môže znížiť účinnosť produktu, zhoršiť už existujúci problém alebo spôsobiť problémy nové. Pre každú jednotlivú aplikáciu spotrebujte celý obsah fľaštičky. Drzte mimo dosahu detí. Neprehŕtajte. Pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte v prípade akýchkoľvek poranení v oblasti vagíny. Pri súčasnej liečbe inými liekmi/zdravotníkmi pomôckami sa pred použitím poraďte so svojím ošetroujúcim lekárom. Nepoužívajte počas menštruácie. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený obal. Nepoužívajte po uplynutí lehoty použiteľnosti. Dátum

expirácie sa vzťahuje na neporušený a správne skladovaný produkt. V prípade podráždenia alebo precitliveneosti na akúkoľvek zložku produktu prestaňte produkt používať. Ak symptómy pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára. Prípravok nepoužívajte viac ako 30 po sebe idúcich dní. U tehotných, dojčiacich žien a u detí sa prípravok používa iba v nevyhnutných prípadoch a pod lekársym dohľadom. V prípade neporušenej panenskej blany sa o konkrétnych podmienkach používania poraďte so svojím gynekológom. O akýchkoľvek vedľajších účinkoch, ktoré nie sú zmienené v tomto príbalovom letáku, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Vedľajšie účinky:

Pri správnom použití neboli zatiaľ zistené žiadne vedľajšie účinky, ktoré sa týkajú špecifického použitia prípravku. Jeho znášanlivosť bola overená, ale v prípade akéhokoľvek podráždenia alebo alergických reakcií prestaňte prípravok používať a kontaktujte svojho lekára/gynekológa.

Balenie:

3 fľaštičky po 100 ml + 3 jednorazové aplikátory.

Dátum poslednej revízie: 12/2019

Distributor:

Dr.Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha 1, Česká republika



Distribútor:

Dr.Max Pharma s.r.o.,
Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha 1, Česká republika

