

Cooling Patches



CZ Chladivé hydrogelové náplasti, 6 ks
Zdravotnický prostředek
Návod k použití

1. Určený účel

Používá se ke snížení teploty u pacientů s horečnatými stavy. Pouze na neporušenou kůži na povrchu těla.

2. Model

12 x 5 cm

Není nutná kombinace s jinými produkty, lze použít samostatně.

3. Složení chladivé složky:

Polyakrylát sodný, dihydroxyaluminium aminoacetát, kyselina vinná, voda.

4. Způsob použití

- Odstraňte průhlednou fólii a přiložte modrou gelovou náplast na čelo, krk, spánky nebo na jiné místo, které je zapotřebí chladit.
Lze dle potřeby nastříhat na vhodnou velikost.
- Neaplikujte na vlasy. Pokud je povrch pokožky vlhký, před použitím ji otřete. Vyhněte se opakovanému lepení, aby nedošlo ke snížení přilnavosti.
- S ohledem na hygienu a funkčnost tohoto výrobku použijte vždy jeden kus.
- Lepšího chladivého účinku lze dosáhnout, pokud před použitím vložíte výrobek do lednice (nekládejte však do mrazáku).

5. Indikace

Chladivá náplast je speciálně navržena tak, aby podpořila snížení teploty u pacienta s horečnatými stavy.

6. Kontraindikace

Chladivé náplasti by neměly používat osoby, které jsou necitlivé na teplotní extrémy, jako jsou např. osoby s oběhovými problémy, diabetem, poškozením nervů, paralýzou nebo citlivou pokožkou. Při léčbě dětí je nutný dohled dospělé osoby.

7. Bezpečnostní opatření a upozornění

- Nepoužívejte na místa s poškozením kůže (rány, ekzémy, dermatitida atd.) a v oblasti očí.
- Dětem, kojencům, pacientům s kognitivními poruchami a osobám s fyzickým postižením, včetně těch, které si náplast nejsou schopny odstranit sami, hrozí riziko udušení, pokud si náplast vloží do úst nebo nosu. Děti by měly používat přípravek pod dohledem dospělých.
- Výrobek se používá jako pomůcka ke snížení horečky a není klasifikován jako léčivý přípravek. Pokud vysoká horečka přetrvává, vyhledejte co nejdříve pomoc lékaře.
- Osoby se sklonem k alergiím by se měly před použitím poradit s lékařem.
- Pokud během použití zaznamenáte silné nepříjemný pocit (např. svědění, bolest atd.) nebo abnormální stav kůže (např. zarudnutí, otok, vyrážka atd.), a v důsledku toho předpokládáte, že nejste způsobili k aplikaci na kůži, přestaňte náplast používat. Pokud se kožní problémy nezlepšují, přineste tento výrobek na kožní oddělení nemocnice a požádejte o ošetření.

- Používejte dle pokynů lékaře.
- Chladivý účinek a jeho doba trvání se mohou mírně lišit v závislosti na podmínkách použití.
- Případnou závažnou nežádoucí příhodu nahlaste výrobci a příslušnému úřadu.

8. Doprava, skladování a likvidace

Produkt lze skladovat a přepravovat při pokojové teplotě v suchém a větraném prostředí.
Lze likvidovat s domovním odpadem.

	Výrobce
	Číslo šarže
	Označení CE
	Datum výroby
	Čtěte návod k použití
	Chraňte před slunečním zářením
	Nepoužívat opětovně
	Dovozce
	Zplnomocněný zástupce v Evropské unii
	Použit do data
	Nepoužívejte, je-li obal poškozený
	Pozor, viz. návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Udržujte v suchu
	Jedinečný identifikátor prostředku
	Katalogové číslo

Datum vydání: 05. 03. 2024

Verze: 2023. 05. 20

Cooling Patches



SK Chladivé hydrogélové náplasti, 6 ks
Zdravotnícka pomôcka
Návod na použitie

1. Účel určenia

Používa sa na zníženie teploty u pacientov s horúčkovými stavmi. Len na neporušenú kožu na povrchu tela.

2. Model

12 x 5 cm

Nie je potrebná kombinácia s inými produktmi, je možné použiť samostatne.

3. Zloženie chladivej zložky

Polyakrylát sodný, dihydroxyglycinát hlinitý, kyselina vínna, voda.

4. Spôsob použitia

- 1) Odstráňte priehľadnú fóliu a priložte modrú gélovú náplasť na čelo, krk, spánky alebo na iné miesto, ktoré je potrebné chladiť. Podľa potreby je možné natrihať na vhodnú veľkosť.
- 2) Neaplikujte na vlasy. Ak je povrch pokožky vlhký, pred použitím ju utrite. Snažte sa vyhnúť opakovanému nalepovaniu, aby ste predišli zníženiu prílivosti.
- 3) S ohľadom na hygienu a funkčnosť tohto výrobku použite vždy len jeden kus.
- 4) Lepší chladivý účinok je možné dosiahnuť vložení výrobku pred použitím do chladničky (nevkladajte ho do mrazničky).

5. Indikácie

Chladivá náplasť je špeciálne navrhnutá tak, aby podporila zníženie teploty u pacienta s horúčkou.

6. Kontraindikácie

Chladivé náplasti by nemali používať osoby, ktoré jsou necitlivé na teplotní extrém, jako jsou např. osoby s oběhovými problémy, diabetem, poškozením nervů, paralýzou nebo citlivou pokožkou. Při léčbě dětí je nutný dohled dospělé osoby.

7. Preventívne opatrenia a upozornenia

- Nepoužívajte na miesta s poškodením kože (rany, ekzémy, dermatitída atď.) a v oblasti očí.
- Deťom, dojčencom, pacientom s kognitívnymi poruchami alebo osobám s telesným postihnutím, ako aj tým, ktorí si ich nedokážu odstrániť sami, hrozí riziko udusenía, pokiaľ by sa náplasť vložila do úst alebo nosa. Používajte ich pod dohľadom dospelých osoby.
- Výrobok sa používa ako pomôcka na zníženie horúčky a nie je klasifikovaný ako liečivý prípravok. Ak vysoká horúčka pretrváva, vyhľadajte čo najskôr lekársku pomoc.
- Osoby so sklonom k alergiám by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.
- Ak počas používania zaznamenáte silne nepríjemný pocit (napr. svrbenie, bolesť atď.) alebo abnormálne prejavy na koži (napr. začervenanie, opuch, vyrážka atď.), ktoré znemožňujú použitie na koži, prestaňte náplasť používať. Ak sa kožné problémy nezlepšujú, prineste tento výrobok na kožné oddelenie nemocnice a požiadajte o ošetrovanie.

- Používajte ju podľa pokynov lekára.
- Chladivý účinok a jeho trvanie sa môžu mierne líšiť v závislosti od podmienok použitia.
- Prípadnú závažnú nehodu nahláste výrobcovi a príslušnému úradu.

8. Doprava, skladovanie a likvidácia

Produkt je možné skladovať a prepravovať pri izbovej teplote v suchom a vetranom prostredí. Je možné likvidovať s domovým odpadom.

	Výrobca
	Číslo šarže
	Označenie CE
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Chrániť pred slnkom
	Nepoužívať opakovane
	Dovozca
	Splnomocnený zástupca v Európskej únii
	Použite do dátumu
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený
	Pozor, pozri návod na použitie
	Zdravotnícka pomôcka
	Uchovávať v suchu
	Unikátny identifikátor pomôcky
	Katalógové číslo

Dátum vydania: 05. 03. 2024

Verzia: 2023. 05. 20

Dr.Max⁺ Dr.Max DBC, Florentinum (D), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1		COLORS		SPECIALS	
PRODUCT NAME:	Cooling patches		Black		
BAR CODE:	8595566429997				
DIMENSION (rozměr):	148 x 210 mm				
DATE:	12. 12. 2025				
ARTWORK SUPPLIER: GRADESI s.r.o., Michaela Karlova, karlova@gradesi.cz					